

MANUAL DE INSTRUÇÕES

IDRA



OFF CARR S.r.l. Via Dell'Artigianato II, 29 35010 Villa del Conte (PD) Italy

Tel. +39 049 9325733 Fax +39 049 9325734

offcarr@offcarr.com - www.offcarr.com

INFORMAÇÕES GERAIS

AVISOS

- Por favor leia este manual cuidadosamente antes de realizar quaisquer operações numa cadeira de rodas IDRA.
- Antes de utilizar o dispositivo, verifique que a embalagem está em boas condições (ver par. Empacotamento, Transporte, Entrega e Armazenamento deste manual).
- Todas as cadeiras de rodas IDRA estão etiquetadas com um Número de Série (Matrícula), com a morada do fabricante e a marca CE. Esta etiqueta nunca deverá ser removida por quaisquer razões, de modo a ser possível identificar e garantir os termos e condições do dispositivo.
- As cadeiras de rodas IDRA são desenhadas e produzidas para compensar uma limitação física, de acordo com a norma Medical Device Essential Requirements da diretiva 93/42/EEC EN. De acordo com a classificação de produto da diretiva acima, apêndice IX par. III. 1.1., as cadeiras de rodas IDRA são classificadas como *dispositivos médicos não-invasivos de classe 1*.
- O uso da IDRA ou dos seus componentes é proibida para quaisquer propósitos que não estejam indicados neste manual.
- Para quaisquer problemas ou falhas ou quebras por favor informe imediatamente o revendedor autorizado e indique-lhe o seguinte:
 - Modelo
 - Número de Série (“Matrícula” na etiqueta dourada do quadro)
 - Descrição do problema
- Em caso de contacto direto com o fabricante informe também:
 - Nome do utilizador e morada completa
 - Nome do revendedor e morada

Empacotamento, Transporte, Entrega e Armazenamento

Todas as cadeiras de rodas OFF CARR são enviadas em caixas de cartão fechadas para as proteger de pancadas e pó.

A caixa inclui a cadeira IDRA configurada conforme o seu pedido e este manual de instruções.

A cadeira de rodas deve ser transportada em camiões para a proteger de agentes atmosféricos, conforme indicado na caixa.

Aquando a receção, verifique a integridade da caixa e caso haja problemas, registre na nota receção.

Abra a caixa, remova a cadeira de rodas e verifique se não está dobrada, arranhada ou danificada. Em caso de problemas, registre a situação e notifique imediatamente o despachante.

Após estas verificações, coloque a cadeira de rodas de novo na caixa até ela ser usada e mantenha-a num local seco.

Não coloque quaisquer objetos por cima da caixa.

1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

CADEIRAS DE RODAS IDRA

A IDRA é uma cadeira de rodas ortopédica de estrutura rígida em liga ultra-leve de alumínio.

As cadeiras de rodas IDRA são muito versáteis nas suas diferentes configurações e com os seus diferentes níveis de ajuste para satisfazer as necessidades do seu utilizador.

O patim pode ser ajustado em altura com pequenos intervalos e pode ser escolhido aberto ou fechado conforme o selecionado no configurador.

O eixo de extração rápida das rodas posteriores permite reduzir o peso e o volume do produto durante a sua transferência.

O encosto pode ser dobrado para a frente, reduzindo ainda mais o volume do produto. Para isto, basta puxar o cordel na parte inferior da traseira do encosto para o desbloquear.

As cadeiras de rodas IDRA são montadas e fornecidas de acordo com as suas escolhas no configurador. Ajustes posteriores são sempre possíveis e devem ser realizados por técnicos autorizados para satisfazer as necessidades do utilizador.

Por favor consulte o configurador da IDRA para ver a gama completa de opções e acessórios.

2. PREPARAÇÃO DA CADEIRA DE RODAS

COMO PREPARAR A CADEIRA DE RODAS ANTES DE A UTILIZAR

A cadeira de rodas é expedida com as rodas posteriores desmontadas e com o encosto rebatido.

O encosto pode ser levantado até os pinos de bloqueio o trancarem na posição pré-definida. Ao puxar o cordel do encosto, que desbloqueará os pinos, este poderá ser dobrado novamente.

Para encaixar as rodas posteriores no quadro, introduza o veio do eixo no encaixe por baixo do assento enquanto pressiona o botão do veio.

Verifique que as rodas estão presas corretamente, para isso tente removê-las sem pressionar o botão do veio.


Se a cadeira de rodas necessitar de mais ajustes para melhor responder às necessidades do utilizador, contacte o seu revendedor ou outra pessoa qualificada.

3. AJUSTES DA CONFIGURAÇÃO

3.1. AJUSTE DOS PROTETORES DE ROUPA

É possível ajustar os protetores de roupa em fibra de carbono. Isto poderá ser necessário caso tenha alterado o tipo de pneu para outro de perfil diferente:


- Desaperte os dois parafusos “A” que seguram o protetor de roupa em carbono na asa de alumínio;
- Altere a posição do protetor de roupa em fibra de carbono para a que necessita;
- Preste atenção à distância entre o pneu e o protetor de roupa, que deverá ser cerca de 1 cm ou menos;
- Aperte bem os dois parafusos “A”

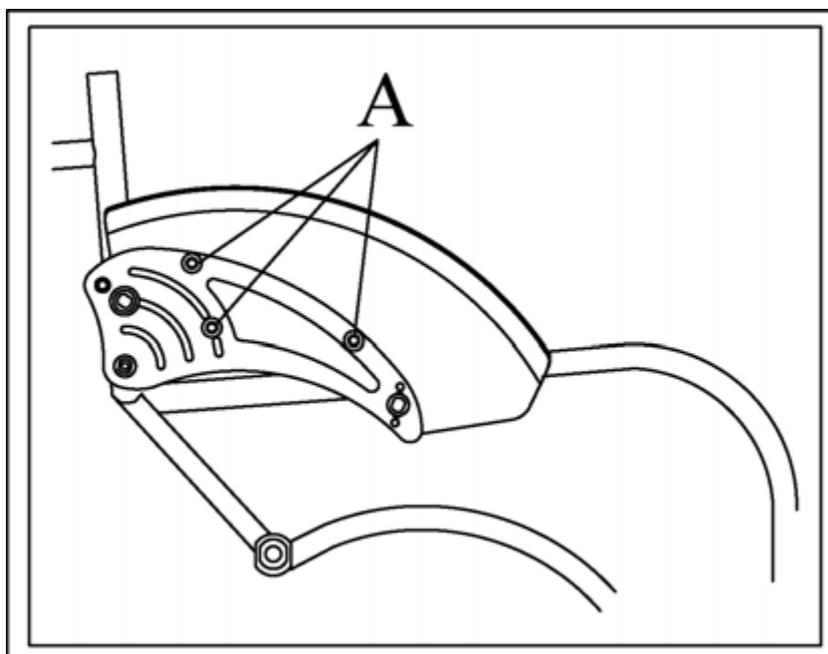

3.2. AJUSTE DO ÂNGULO DO ENCOSTO

Após ajustar o centro de gravidade ou alterar a altura dianteira/traseira da cadeira de rodas para se sentar de forma mais confortável, é possível ajustar o ângulo de encosto para acompanhar esta alteração:


- Desaperte e remova a porca que se encontra debaixo do assento e corresponde ao parafuso "A";
- Desaperte e remova o parafuso "A";
- Escolha a posição mais conveniente;
- Insira e aperte bem o parafuso e porca "A".

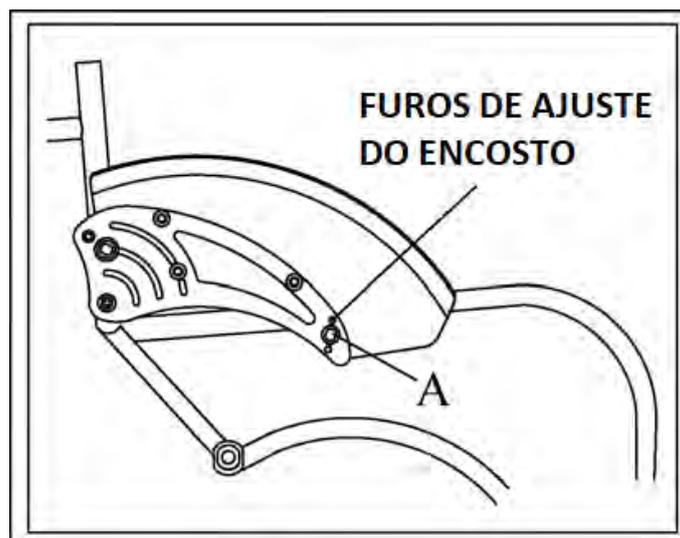

3.3. AJUSTE DO ENCOSTO EM TENSÃO

O encosto em tensão pode ser facilmente ajustado através de faixas de velcro que se encontram no interior do tecido:


- Levante o tecido do encosto na parte posterior;
- Estique ou solte as faixas de velcro de acordo com a necessidade do utilizador;
- Volte a colocar o tecido no local original para completar a operação.

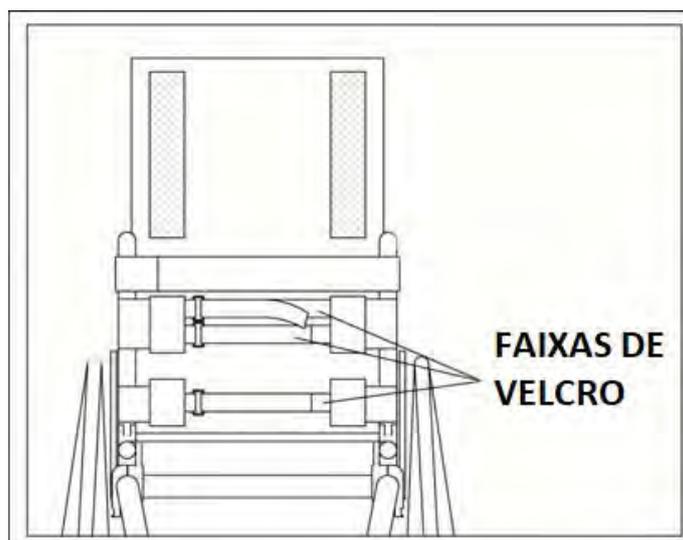

3.4. AJUSTE DA ALTURA DO ENCOSTO

Na altura da compra, a altura do encosto é selecionada, mas é sempre possível realizar ajustes posteriores:


- Remova o tecido do encosto;
- Remova os parafusos “A” para libertar os tubos do encosto;
- Suba ou desça os tubos do encosto de acordo com a altura que deseja (os tubos possuem um furação prévia para permitir ajustes de 2 em 2 cm);
- Coloque e aperte bem os parafusos “A”
- Volte a colocar o tecido do encosto.

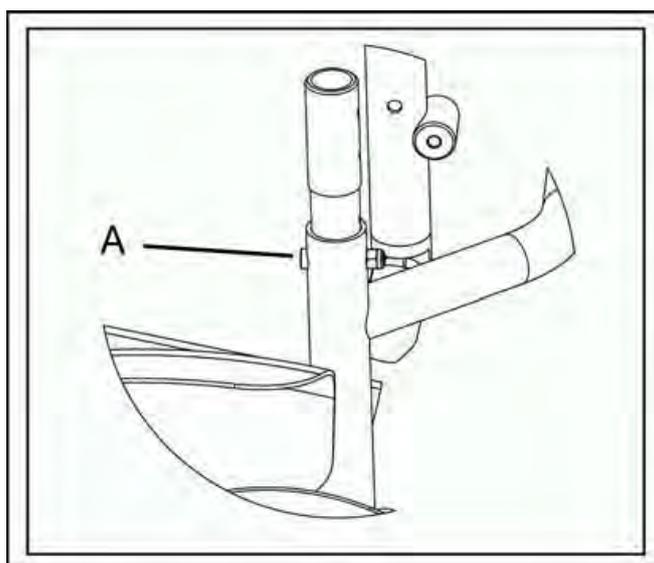

3.5. AJUSTE DA ALTURA DO PATIM

Os tubos que suportam o patim são deslizáveis em altura e apertados pelos dois parafusos de fixação “C” do quadro anterior da cadeira de rodas:


- Desaperte e remova os parafusos “A” e “B”;
- Deslize o patim para a posição desejada;
- Coloque e aperte bem os parafusos “A” e “B”

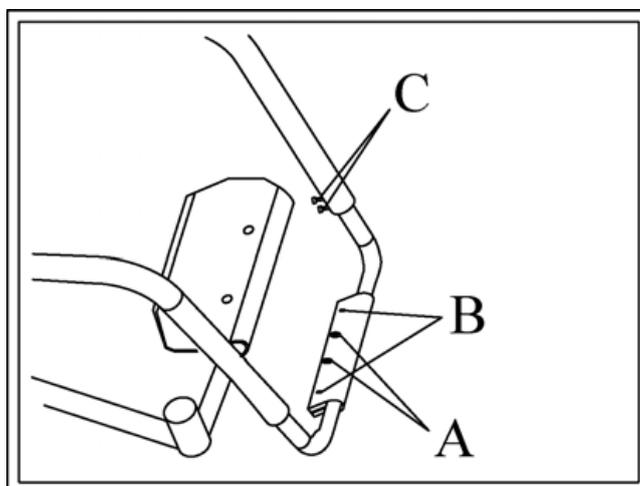

3.6. AJUSTE DO TRAVÃO

Se necessitar, poderá ajustar a posição do travão da seguinte forma:

- Desaperte o parafuso “A”;
- Deslize o travão para a posição pretendida;
- Volte a apertar o parafuso “A”.

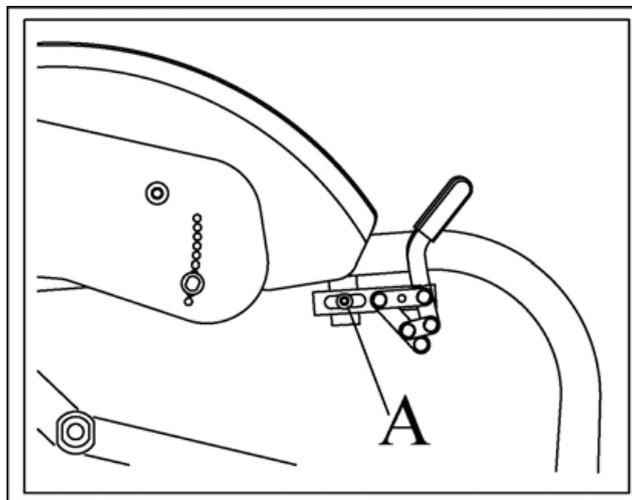

4. COMO UTILIZAR A CADEIRA DE RODAS

Para uma utilização segura e eficiente da cadeira de rodas, por favor consulte o seu terapeuta ou outro técnico qualificado. O uso correto e com boa manutenção da cadeira de rodas irá ajudar a preservar as suas características originais durante um longo período de tempo.

Os travões servem apenas para parquear a cadeira, nunca os utilize para reduzir a velocidade da cadeira de rodas.

Se os pneus não estiverem com a pressão correta, os travões não funcionarão de forma correta.

As cadeiras de rodas IDRA são desenhadas para pessoas muito ativas e, de acordo com a configuração escolhida, poderão ser bastante instáveis. Neste caso, o utilizador sentirá que a cadeira de rodas é muito fácil de conduzir, mas ao mesmo tempo entrará em “cavalinho” rapidamente caso o utilizador não tenha cuidado. Esta configuração servirá utilizadores com bom controlo ou equilíbrio de tronco. Se necessitar, a cadeira poderá vir equipada com rodas anti-volteio (ver configurador da IDRA).

Evite contacto entre a cadeira de rodas e a água do mar ou areia. No caso de isto acontecer, limpe a cadeira de rodas com água limpa e seque-a imediatamente para evitar danos na estrutura.

A cadeira de rodas é desenhada para o transporte de uma pessoa. Não serve outros tipos de utilização.

NOTAS

Mantenha a cadeira de rodas longe de fogo ou de fontes de elevada temperatura; os tecidos não são à prova de fogo. A cadeira de rodas é produzida com materiais testados para evitar alergias ou outros problemas de pele. Se quaisquer problemas ocorrerem relacionados com o material ou com a tinta usada na cadeira de rodas, por favor contacte o seu médico e informe a OFF CARR.

Os tecidos são laváveis em água a 30°. É sempre recomendado evitar imersões completas do tecido ou das partes do quadro.

INSPEÇÕES E MANUTENÇÃO

Recomendamos que inspecione semanalmente:

- A pressão dos pneus. Verifique na lateral do pneu onde indicará a pressão indicada para o seu modelo de pneu.
- A eficácia do eixo de extração rápida e se necessário adicione algumas gotas de lubrificante no encaixe do eixo.
- O tecido do encosto em tensão de forma a manter a posição mais confortável.
- A eficiência dos travões

Sugerimos que verifique a cada três meses;

- O aperto dos parafusos da forqueta das rodas anteriores;
- O desgaste das rodas anteriores;
- O ângulo perpendicular das rodas anteriores ao piso;
- A eficiência dos rolamentos das forquetas;
- Se necessário adicione lubrificante às partes móveis.

Aconselhamos que entre em contacto com um técnico autorizado e especializado para realizar quaisquer medidas de manutenção extraordinárias neste dispositivo.

5. TERMOS DE GARANTIA

5.1. O quadro tem garantia de 3 anos desde a data de entrega da cadeira de rodas.

5.2. Partes sujeitas a desgaste normal não estão cobertas pela garantia, a não ser que o desgaste tenha sido causado por um erro de fabrico,

5.3. A Garantia não cobre custas de transporte.

5.4. Se ocorrer um problema durante o período de garantia, a OFF CARR irá:

- a) Reparar a parte defeituosa;
- b) Substituir a parte defeituosa.

5.5. A garantia não cobre danos causados por negligência, uso impróprio, maus tratos ou manutenção incorreta por técnicos não autorizados ou pelo utilizador.

5.6. A OFF CARR não é responsável por quaisquer danos ocorridos durante o transporte. A empresa de transporte é a única responsável, assim sendo por favor informe a OFF CARR e a empresa transportadora de quaisquer danos ocorridos.

5.7. Esta garantia não cobre custos derivados por lesões ou outros danos eventualmente causados com o mau funcionamento da cadeira de rodas.

5.8. A etiqueta com o número de série nunca deverá ser removida do quadro da cadeira de rodas, caso contrário a garantia perderá a sua validade.

6. CARTÃO DA GARANTIA

Preencha e envie este cartão até 10 dias após a compra do dispositivo

Apelido.....

Nome

Morada

.....

Contacto

MODELO DA CADEIRA DE RODAS: **IDRA**

Revendedor

.....

Data de compra

Número de série(ver na etiqueta dourada)

Ano de produção(ver na etiqueta dourada)

Todas as informações serão tratadas de acordo com o Regime Geral de Proteção de Dados em vigor em Portugal e com a Privacy Tutelage Regulation em vigor em Itália.

A OFF CARR s.r.l. reserva o direito de modificar ou melhorar o produto sem aviso prévio, respeitando os termos de garantia e de partes disponíveis com base nos termos da Lei em vigor em Itália.

O Manual de Instruções é constantemente atualizado, mas é possível que algumas melhorias no produto não estejam ainda incluídas no manual em vigor.