

Almofada ROHO® Hybrid Elite®
Manual do Utilizador



Almofada ROHO® Hybrid Elite® Manual de Operações

Observe

Fornecedor: Este manual deve ser entregue ao usuário deste produto.

Operador (Pessoa ou Cuidador): Antes de utilizar este produto, leia as instruções e guarde para referência futura.

Os produtos podem ser cobertos por uma ou mais patentes e marcas comerciais dos EUA e estrangeiras, incluindo: ROHO®, DRY FLOATATION®, shape fitting technology®, Hybrid Elite®, Hybrid Elite SR™, Smart Check® e Sensor Ready™. Zytel® é uma marca registrada da DuPont.

As informações dos produtos são alteradas conforme necessário; Informações atualizadas do produto estão disponíveis em permobilus.com.

ROHO, Inc. é parte do Permobil Seating and Positioning.

© 2009, 2019 Permobil

Rev. 2019-02-19

Tabela de conteúdo

Uso Pretendido	112
Informações Importantes de Segurança	112-113
Detalhe das Peças	114
Ajuste de Almofada	114-115
Remoção e Substituição da Capa	
Remoção e Substituição do Enchimento da Almofada	116
Remoção e Substituição do Enchimento de Espuma	117
Limpeza e Desinfecção	118-19
Solução de problemas	120
Armazenamento, Eliminação e Reciclagem	
Garantia Limitada	
Especificações do Produto	121

Símbolos de segurança



Alerta:

Indica que não seguir o procedimento especificado pode levar a condições potencialmente perigosas, resultando em ferimentos graves.



Cuidado:

Indica que não seguir o procedimento especificado pode levar a condições potencialmente perigosas, resultando em ferimentos leves a moderados, ou danos ao equipamento ou outra propriedade.

Informações de contato



ROHO, Inc.

100 N. Florida Avenue
Belleville, IL 62221-5429 U.S.A.

EUA.:

800-851-3449
Fax: 888-551-3449

Atendimento ao Cliente:

orders.roho@permobil.com

Fora dos EUA:

618-277-9150
Fax 618-277-6518
intlorders.roho@permobil.com

Uso Pretendido

A Almofada ROHO® Hybrid Elite® (Hybrid Elite Cushion) é uma superfície de suporte de cadeira de rodas com uma base com contornos de espuma, combinado com um enchimento, ajustável, cheio de ar, com design celular destinado a se conformar à forma de uma pessoa sentada para oferecer proteção à pele/tecidos moles e posicionamento, e um ambiente para facilitar a cicatrização de feridas. Há um limite de peso de 500 lbs. (225 kg), e a almofada deve ser devidamente dimensionada para a pessoa. A Almofada Hybrid Elite deve ser utilizada com a capa fornecida. Modelos de almofada incluem:

- Almofada ROHO® Hybrid Elite SR™ (Hybrid Elite SR)
- Almofada de Compartmento Duplo ROHO® Hybrid Elite® (Almofada de Compartmento Duplo Hybrid Elite Dual)

A Almofada Elite Hybrid SR Cushion é compatível com o Smart Check® da ROHO®.

Um clínico com experiência em acomodação e posicionamento deve determinar se o produto é adequado para as necessidades particulares de acomodação do indivíduo. Apenas a indicação do uso pretendido deste produto não deve ser considerado confiável para fazer esta determinação.

Os produtos médicos apresentados neste documento são destinados a ser apenas parte de um regime de cuidados gerais que inclui equipamentos de acomodação e mobilidade e intervenções terapêuticas. Um clínico com experiência em acomodação e posicionamento deve identificar este regime de cuidados após avaliar as necessidades físicas do indivíduo e sua condição médica geral.

Um clínico também deve avaliar deficiências visuais, de leitura ou cognitivas, para determinar a necessidade de ajuda de um cuidador ou de outras tecnologias assistenciais, tais como instruções em letras maiores, para assegurar o uso correto do produto.

Informações Importantes de Segurança



Advertencias:

- Ruptura de pele/tecido mole pode ocorrer devido a um número de fatores, que variam de acordo com cada indivíduo. Verifique a pele com frequência, pelo menos uma vez por dia. Vermelhidão, hematomas, manchas escuras (quando comparado com a pele normal) podem indicar lesão do tecido superficial ou profundo e precisam ser tratados. Se houver alguma descoloração da pele/tecido macio, PARE O USO imediatamente. Se a descoloração não desaparecer dentro de 30 minutos após a interrupção do uso, consulte imediatamente um profissional de saúde.
- A Almofada e a capa DEVEM ser de tamanhos compatíveis e DEVEM ser utilizados conforme as instruções deste manual. SE NÃO FOREM: 1) os benefícios proporcionados pela almofada podem ser reduzidos ou eliminados, aumentando o risco para a pele ou outros tecidos moles, e 2) a pessoa pode ficar instável e vulnerável à quedas.
- NÃO use a almofada encima, ou em conjunto com, quaisquer outros produtos ou materiais, exceto quando indicado neste manual. Fazer isso poderá causar instabilidade à pessoa e vulnerabilidade a quedas.
- NÃO coloque nenhum obstáculo entre a pessoa e a almofada. USE SOMENTE uma capa compatível com a almofada; colocar qualquer outro item diretamente embaixo da pessoa, seja dentro ou fora da capa, irá diminuir a eficácia da almofada.
- NÃO utilize os componentes deste produto separadamente. A almofada deve ser utilizada com todos os componentes montados.

Informações Importantes de Segurança. Continuação



Advertencias. Continuação

- **NÃO** utilizar esta almofada como um dispositivo de flutuação na água (ex. Colete salva-vidas). Ela **NÃO** irá suportá-lo na água.
- A superfície da almofada irá se aclimatar à temperatura do ambiente. Tome os cuidados apropriados, especialmente quando a almofada entrar em contato com pele desprotegida.
- **NÃO** exponha o produto a altas temperaturas, chamas ou cinzas quentes. Reivindicações de testes ou certificações, incluindo inflamabilidade, podem já não se aplicar a este dispositivo quando combinado com outros produtos ou materiais. Verifique reivindicações de testes ou certificações para todos os produtos utilizados em combinação com este dispositivo.
- Se você não for capaz de executar qualquer uma das tarefas neste manual, procure assistência entrando em contato com o médico, fornecedor do equipamento, distribuidor ou com a Atendimento ao Cliente.




Cuidados


- Usar uma bomba, capa ou kit de reparos diferentes daqueles compatíveis com seu produto pode anular a garantia do produto.
- **NÃO** modifique a almofada ou quaisquer componentes. Fazer isso pode resultar em danos ao produto e irá anular a garantia.
- **NÃO** permitir que sua almofada entre em contato com loções ou lanolina à base de óleo. Isto pode degradar o material.
- Exposição prolongada ao ozônio pode degradar materiais utilizados na almofada, afetar o desempenho da almofada e anular a garantia do produto.
- Mudanças de altitude podem exigir um reajuste para sua almofada.
- Mantenha a almofada longe de objetos pontiagudos.
- Se a almofada tiver estado em temperaturas inferiores a 32 ° F (0 ° C), e exibir rigidez incomum, deixe a almofada aquecer até a temperatura ambiente.
- Periodicamente, verifique os componentes quanto a danos e substitua se necessário. Ver "Solução de problemas".
- **NÃO** use a válvula de enchimento ou Desengate Rápido como alça para carregar ou puxar a almofada. Leve a almofada pela base da almofada ou pela alça de transporte na capa.

Detalhe das Peças

Conteúdo da embalagem: almofada Hybrid Elite, capa, kit de reparo, bomba manual, manual de operações, livreto suplementar de garantia limitada, cartão de registro do produto

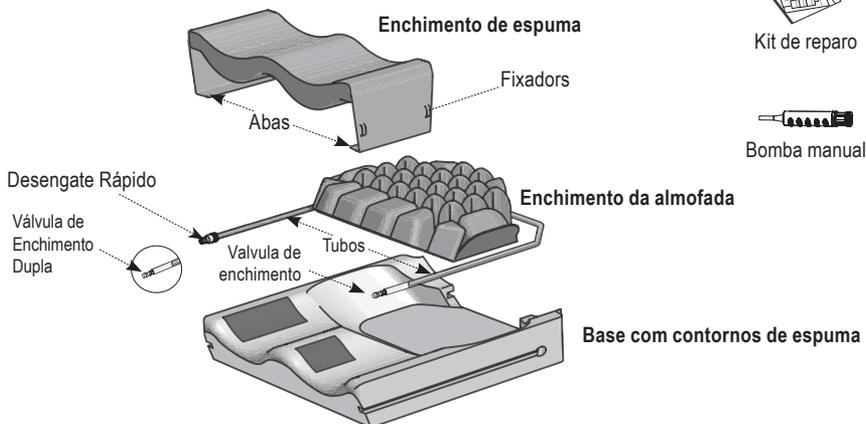

A etiqueta com o número de série está localizada na parte inferior da almofada.

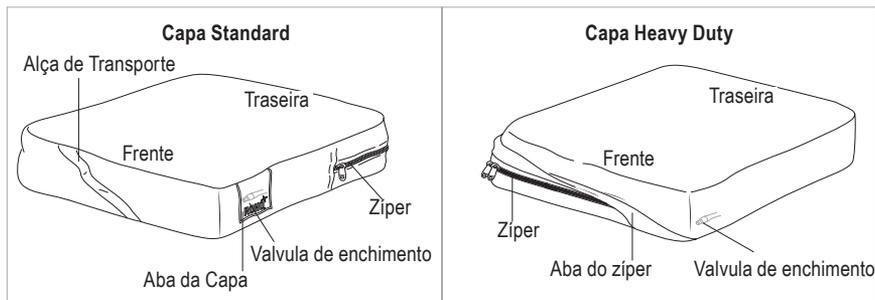

Para pedir peças de reposição, contate seu fornecedor do produto ou a Atendimento ao Cliente.

Ajuste de Almofada

A Hybrid Elite SR está equipada com Sensor Ready Technology e pode ser usado com o Smart Check by ROHO, que é um sistema de feedback da almofada. o Smart Check pode ser usado para achar o nível de enchimento do indivíduo e ajudar a verificar a sua almofada. Para mais informações, contate o Atendimento ao Cliente.

Nota: Se você possui Smart Check by ROHO, **PARE AQUI** e consulte o *Manual de Operação Smart Check*.



Ajuste de Almofada. Continuação



Advertencias:

- Verifique o enchimento com frequência, pelo menos uma vez ao dia!
- **NÃO** utilize uma almofada sub-inflada ou super-inflada, porque os benefícios do produto serão reduzidos ou eliminados, resultando em um aumento do risco para a pele e outros tecidos moles. Se a almofada não parece estar retendo o ar, ou se você não consegue encher ou esvaziar a almofada, consulte Solução de problemas. Contate imediatamente o seu cuidador clínico, distribuidor ou a Atendimento ao Cliente se o problema persistir.
- Quando possível, utilize o gancho ou os fixadores autoadesivos para prender melhor a almofada à superfície de assentamento. Prendedores com gancho estão disponíveis mediante solicitação.

Nota: Para almofadas de compartimento duplo, repita todos os passos para ambas as válvulas.


1. Posicione a almofada na cadeira com as células de ar voltadas para cima e a superfície antiderrapante da capa voltada para baixo.
2. Abra a aba da capa* e deslize o bico de borracha da bomba manual sobre a válvula de enchimento. Abra a válvula de enchimento, pelo menos uma rotação completa.

*Para a capa reforçada pesado abra o zíper.



3. Encha até que todas as células de ar estejam firmes. Feche a válvula de enchimento até que ela pare. Remova a bomba manual. Certifique-se de que a válvula de enchimento esteja fechada.
4. A pessoa deve sentar-se na cadeira em sua posição habitual. Confirme se as proeminências ósseas estão apoiadas pelas células de ar.
5. Deslize sua mão entre as células de ar e a pessoa. Levante suavemente a perna e sinta a proeminência óssea mais baixa e, em seguida, abaixe a perna para uma posição sentada.
6. Abra a válvula para retirar o ar, mantendo a sua mão debaixo da proeminência óssea mais baixa da pessoa. Solte o ar até que você consiga mover suas pontas dos dedos. Feche a válvula.



Advertencias: Certifique-se de que haja, pelo menos, ½ pol. (1,5 cm) de ar apoiando as proeminências ósseas mais baixas do indivíduo.

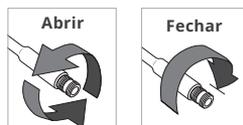

Nota: A válvula de enchimento irá girar livremente quando aberta.

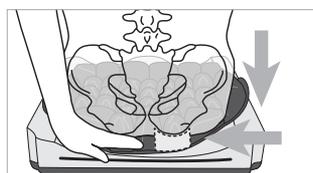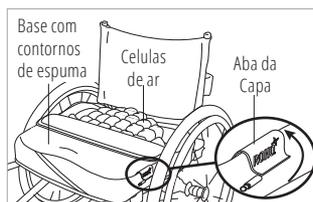

 = ½ - 1 pol. (1,5 - 2,5 cm)
 A distância recomendada entre a pessoa e a superfície do assento.

Remoção e Substituição da Capa

Remoção da Capa:

1. Abra o zíper da capa.
2. Somente para Capas Standard: Abra a aba da capa. Alcance no interior da capa e puxe a válvula de enchimento através da abertura para que esteja no interior da capa. Repita no outro lado.
3. Remova a capa da almofada.

Substituição da Capa:



Atenção: Antes de substituir a capa, certifique-se que os enchimentos de espuma e da almofada estão corretamente posicionados e bem fixos. Ver "Substituição do Enchimento de Espuma" e "Substituição do Enchimento da Almofada".

Instruções da Capa Standard

1. Abra o zíper da capa e com as células de ar voltadas para cima e a superfície antiderrapante da capa voltada para baixo, insira a almofada na capa.
2. A parte de trás da almofada deve estar virada para o zíper.
3. Abra a aba da capa. Coloque a mão dentro da capa e empurre a válvula de enchimento através da abertura por baixo da aba da válvula. Repita no outro lado.
4. Feche a capa com o zíper. Se as tiras do fixador autoadesivo foram removidos antes de lavar, recoloque as tiras.

Instruções da Capa Heavy Duty

1. Abra o zíper da capa e com as células de ar voltadas para cima e a superfície antiderrapante da capa voltada para baixo, insira a almofada na capa.
2. A frente da almofada deve estar voltada para o zíper.
3. Enfie todos os tubos no interior da capa.
4. Feche a capa com o zíper. Se as tiras do fixador autoadesivo foram removidos antes de lavar, recoloque as tiras.





Remoção e Substituição do Enchimento da Almofada

Remoção do Enchimento da Almofada:

1. Remover a capa da almofada. Ver "Remoção da Capa".
2. Deslize os tubos para fora do fixador sobre o enchimento de espuma.
3. Retire os tubos da ranhura na base de espuma e puxe suavemente através do orifício no canto da base de espuma. Repita no outro lado.
4. Remova o enchimento da almofada da base de espuma com contornos.

Substituição do Enchimento da Almofada:



1. Coloque o enchimento da almofada sobre a base de espuma, alinhando os ganchos e as tiras dos fixadores autoadesivos. Certifique-se o enchimento da almofada está centralizado. Pressione para baixo para fixar firmemente o enchimento da almofada à base de espuma.
2. Insira os tubos através do orifício no canto da base de espuma. Repita no outro lado.
3. Deslize os tubos através do fixador sobre o enchimento de espuma e pressione-a para dentro da ranhura na base de espuma. Repita no outro lado.
4. Confirme o posicionamento correto do enchimento de espuma. Ver "Substituição do Enchimento de Espuma".
5. Recoloque a capa. Ver "Substituição da capa".

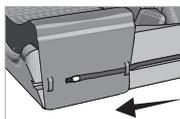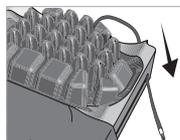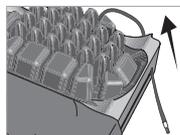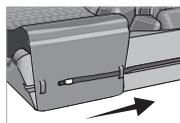

Remoção e Substituição do Enchimento de Espuma

Remoção do Enchimento de Espuma:

1. Remover a capa da almofada. Ver "Remoção da Capa".
2. Deslize os tubos para fora do fixador sobre o enchimento de espuma. Repita no outro lado.
3. Vire a almofada de forma que as células fiquem voltadas para baixo e a parte inferior da base com contornos de espuma fique voltada para cima.
4. Puxe a aba do enchimento de espuma para longe das partes do gancho de fixação na parte inferior da base com contornos de espuma. Repetir para o outro lado.
5. Vire a almofada de forma que as células fiquem voltadas para cima e a parte inferior da base com contornos de espuma fique voltada para baixo.

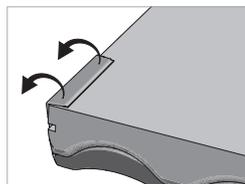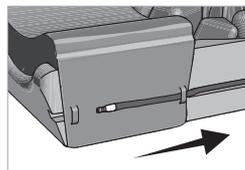


Substituição do Enchimento de Espuma:

Atenção: o Enchimento de espuma deve estar corretamente posicionado sobre a base com contornos de espuma.



Nota: Se o enchimento da almofada foi removido da base com contornos de espuma, substitua a almofada antes de trocar o enchimento de espuma. Ver "Substituição do Enchimento da Almofada".

1. Posicione o enchimento de espuma sobre a base com contornos de espuma.

- A inserção de espuma fica próxima, mas não em cima das células de ar. (A)
- O enchimento de espuma alinha com, mas não ultrapassa a borda dianteira da base de espuma. (B)
- O enchimento de espuma está centrado sobre a base de espuma.

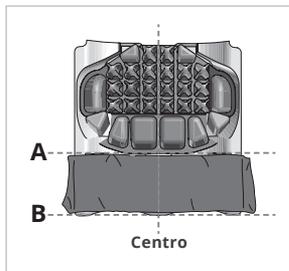

2. Uma vez posicionado corretamente, pressione o enchimento de espuma para anexá-lo firmemente à base com contornos de espuma.
3. Deslize os tubos através do fixador sobre o enchimento de espuma. Se necessário, empurre os tubos de volta para dentro da ranhura. Repita no outro lado.
4. Vire a almofada de forma que as células fiquem voltadas para baixo e a parte inferior da base com contornos de espuma fique voltada para cima.
5. Puxe e prenda as abas do enchimento de espuma nas partes do gancho de fixação na parte inferior da base com contornos de espuma.
6. Vire a almofada de forma que as células fiquem voltadas para cima e a parte inferior da base com contornos de espuma fique voltada para baixo.
7. Recoloque a capa. Ver "Substituição da capa".

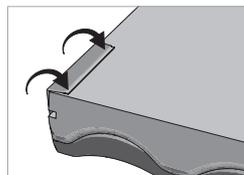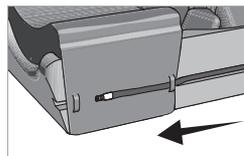

Limpeza e Desinfecção



Advertencia:

- Limpeza e desinfecção são processos separados. A limpeza deve preceder a desinfecção. Antes da utilização por uma pessoa diferente: limpar, desinfetar e verificar o produto para o funcionamento adequado.
- Siga todas as instruções de segurança da embalagem do alvejante e do desinfetante germicida.
- Nota sobre a esterilização: Altas temperaturas aceleram o envelhecimento e danificam a montagem do produto. Os produtos apresentados neste manual não são embalados já esterilizados, nem se destinam ou necessitam ser esterilizados antes da utilização. Se o protocolo da instituição exigir esterilização: Primeiro, siga as instruções de limpeza e desinfecção; em seguida, abra a válvula de enchimento e use a menor temperatura de esterilização possível, mas não superior a 70 ° C (158 ° F), pelo menor tempo possível. NÃO autoclave.

Cuidados com a Capa: Antes de limpar e desinfetar, retire a capa da almofada. Retire os ganchos de fixação da parte inferior da capa.

Para limpar a Capa: Lavar à máquina em água fria (30°C) com detergente neutro, ciclo suave, ou limpe com um detergente neutro e água fria. Centrifugação baixa.



Para desinfetar a Capa: lavar à mão em água fria (30 ° C) usando 1 parte de alvejante líquido doméstico por 9 partes de água. Mantenha o produto molhado com a solução de água sanitária por 10 minutos, e depois enxaguar bem. Ou lavar na máquina em água quente (60 ° C). Centrifugação baixa.



Cuidados com a Almofada: NÃO lavar nem secar o enchimento da almofada, enchimento de espuma ou a base com contornos de espuma. O uso de algum dos seguintes pode causar danos à almofada: abrasivos (palha de aço, esponjas de limpeza); cáusticos, detergentes para máquinas de lavar louça; produtos de limpeza que contêm petróleo ou solventes orgânicos, incluindo acetona, tolueno, metil etil cetona (MEK), nafta, fluido de limpeza a seco, removedor de adesivo; loções à base de óleo, lanolina, ou desinfetantes à base de fenólicos; gás ozônio; métodos de limpeza com luz ultravioleta.



Alerta: NÃO deixar entrar água ou solução de limpeza na almofada. Assegure-se que a válvula de enchimento está fechada. Certifique-se que o Smart Check está separado da almofada. Água em uma almofada com tecnologia Sensor Ready (SR) pode resultar em danos ao Smart Check e causar uma leitura falsa quando usar o Smart Check.

Para limpar e desinfetar o Enchimento da Almofada: Remova cuidadosamente o enchimento da almofada da base com contornos de espuma. Feche a válvula de enchimento. Lave à mão usando sabonete neutro, líquido para lavar louça à mão, sabão em pó, ou detergente multiuso (Siga as instruções do rótulo do produto). Esfregue suavemente todas as superfícies da almofada usando uma escova de cerdas plásticas macias, uma esponja ou um pano. Enxágue com água limpa. Seque ao ar livre. NÃO exponha à luz solar direta. Para desinfetar, repetir as instruções de limpeza usando 1 parte de alvejante líquido doméstico para 9 partes de água. Mantenha produto molhado com a solução alvejante por 10 minutos. Enxágue bem com água limpa. Seque ao ar livre.



Cuidado: Enxágue bem. O resíduo de detergente pode fazer com que as células de ar permaneçam grudadas.

Limpeza e Desinfecção. Continuação

Para limpar e desinfetar a Base com Contornos de Espuma: Retire a capa o enchimento de espuma e a inserção da almofada. Para limpar, esfregue suavemente com um pano umedecido com água e um detergente doméstico e, em seguida, enxágüe com água limpa. Para desinfetar, siga as instruções de limpeza, mas use desinfetante em vez do detergente doméstico. Após a limpeza ou desinfecção, deixe a espuma secar completamente ao ar livre antes de recolocar a capa.



Para limpar e desinfetar o enchimento de Espuma: Para limpar, umedeça um pano e, em seguida, aperte para retirar o excesso de água. Esfregue suavemente com o pano e um detergente doméstico e, em seguida, esfregue novamente com um pano limpo, levemente umedecido. Para desinfetar, siga as instruções de limpeza, mas use desinfetante em vez do detergente doméstico. Após a limpeza ou desinfecção, deixe a espuma secar completamente ao ar livre antes de recolocar a capa.



Símbolos de Cuidados

	Lavar à mão frio, temperatura máxima mostrada.		Alvejante (1 parte de alvejante: 9 partes de água).
	Lavagem à máquina quente, normal, temperatura máxima mostrada.		Lavar na máquina ciclo suave, frio, temperatura máxima mostrada.
	Lavar à mão.		Secar na vertical na sombra.
	Limpe com um pano úmido.		Secar na horizontal na sombra.
			Centrifugação baixa.

Solução De Problemas

Para obter assistência adicional, entre em contato com seu fornecedor de equipamentos, distribuidor ou com o Atendimento ao Cliente.

Não Retém o Ar - Inspeccione se há danos na válvula de enchimento e mangueira. Confirme que as válvulas de enchimento estão completamente fechadas (gire no sentido horário). Procure orifícios na almofada. Se furos muito pequenos ou nenhum estiver visível, siga as instruções no Kit de Reparo fornecido com o produto. Para danos na válvula de enchimento e mangueira, ou para furos maiores ou vazamentos na almofada, consulte a Suplemento de Garantia Limitada, ou contate o Atendimento ao Cliente.

Não é possível encher ou esvaziar a Almofada - Confirme que a(s) válvula(s) de enchimento estão abertas. Inspeccione a(s) válvula(s) de enchimento(s) e mangueira(s) para danos.

Desconfortável / Instável - Confirme que:

- as células de ar não estão sub-infladas ou super-infladas.
- a inserção de espuma e o enchimento da almofada estão corretamente colocados sobre a base com contornos de espuma.
- as células de ar e a parte superior da capa estão voltadas para cima.
- a almofada está centralizada por baixo da pessoa.
- a inserção de espuma não se sobrepõe às células de ar.
- a almofada está devidamente dimensionada para a pessoa e a cadeira de rodas

Permitir à pessoa pelo menos uma hora para se adaptar à almofada.

A almofada desliza sobre a cadeira de rodas - Certifique-se que o fundo antiderrapante da capa de almofada está voltado para baixo. Use as etiquetas direcionais sobre a almofada e na capa para orientar a almofada. Quando possível, utilize o gancho ou os fixadores autoadesivos para prender melhor a almofada à superfície de assentamento. Prendedores com gancho estão disponíveis mediante solicitação.

Componente está Danificado - Contate o Atendimento ao Cliente para substituição.

Armazenamento, Eliminação e Reciclagem

Armazenamento: Limpe e desinfete o produto antes de armazenar. Abra a(s) válvula(s) de enchimento. Esvazie o produto. Armazene o produto em um recipiente que o proteja contra umidade, contaminantes e danos.

Eliminação: Os componentes dos produtos neste manual são associados como sem riscos ambientais conhecidos quando usados corretamente e quando descartados de acordo com os regulamentos locais/regionais. A incineração deve ser realizada por uma instalação de gestão de resíduos qualificada, licenciado.

Reciclagem: Contate uma agência local de reciclagem para determinar as opções de reciclagem para o produto. Para mais informações sobre reciclagem, entre em contato com o Atendimento ao Cliente.

Garantia limitada

Termo de Garantia Limitada: 24 meses a partir da data em que o produto foi comprado originalmente. A garantia não se aplica a furos, rasgos ou queimaduras, nem se aplica à capa removível. Veja também o suplemento de Garantia Limitada fornecida com o seu produto, ou entre em contato com o Atendimento ao Cliente.

Especificações do Produto

Materiais: Enchimento da Almofada: borracha de neoprene, feita sem látex; Válvula de enchimento: Zytel; Base com contornos de espuma: espuma de células fechadas de polietileno; Inserção da espuma: espuma de poliuretano; Capa Standard: estiramento em dois sentidos, laterais de tecido espaçador, com um zíper localizado na parte de trás da capa e um fundo antiderrapante. Consulte o rótulo de cuidados da capa para o conteúdo material. Capa Heavy Duty: estiramento em dois sentidos, parte superior e laterais resistentes a fluidos, com um zíper localizado na frente da capa e um fundo antiderrapante. Consulte a etiqueta de cuidados da capa para o conteúdo material e conformidade com requisitos de flamabilidade.

Tabela de dimensionamento

Almofada		Base de espuma			
Válvula Única	Válvula Dupla	Largura (pol.)	Profundidade* (pol.)	Largura (cm)	Profundidade* (cm)
1RHE1414C-SR	2RHE1414C	13%	14%	35,0	37,5
1RHE1415C-SR	2RHE1415C	13%	15%	35,0	40,0
1RHE1416C-SR	2RHE1416C	13%	16%	35,0	43,0
1RHE1515C-SR	2RHE1515C	14%	15%	37,5	40,0
1RHE1516C-SR	2RHE1516C	14%	16%	37,5	43,0
1RHE1517C-SR	2RHE1517C	14%	17%	37,5	45,0
1RHE1615C-SR	2RHE1615C	15%	15%	40,0	40,0
1RHE1616C-SR	2RHE1616C	15%	16%	40,0	43,0
1RHE1617C-SR	2RHE1617C	15%	17%	40,0	45,0
1RHE1618C-SR	2RHE1618C	15%	18%	40,0	48,0
1RHE1620C-SR	2RHE1620C	15%	20%	40,0	53,0
1RHE1716C-SR	2RHE1716C	16%	16%	43,0	43,0
1RHE1717C-SR	2RHE1717C	16%	17%	43,0	45,0
1RHE1718C-SR	2RHE1718C	16%	18%	43,0	48,0
1RHE1720C-SR	2RHE1720C	16%	20%	43,0	53,0
1RHE1816C-SR	2RHE1816C	17%	16%	45,0	43,0
1RHE1817C-SR	2RHE1817C	17%	17%	45,0	45,0
1RHE1818C-SR	2RHE1818C	17%	18%	45,0	48,0
1RHE1820C-SR	2RHE1820C	17%	20%	45,0	53,0
1RHE2017C-SR	2RHE2017C	19%	17%	50,0	45,0
1RHE2018C-SR	2RHE2018C	19%	20%	50,0	48,0
1RHE2020C-SR	2RHE2020C	19%	20%	50,0	53,0
1RHE2218C-SR	2RHE2218C	21%	18%	55,5	48,0
1RHE2220C-SR	2RHE2220C	21%	20%	55,5	53,0
1RHE2222C-SR	2RHE2222C	21%	22%	55,5	58,0
1RHE2418C-SR	2RHE2418C	23%	18%	60,5	48,0
1RHE2420C-SR	2RHE2420C	23%	20%	60,5	53,0


Peso: 3¼ lbs. / 1,4 kg (com base no 1RHE1817C-SR)

Altura: 4 pol. / 10,0 cm

* As profundidades apresentadas incluem ¾ pol. (1,5 cm) da base de espuma que se encaixa entre os suportes traseiros da cadeira de rodas.

Nota: Todas as medidas são aproximadas. Medições de largura e profundidade são feitas a partir da parte superior da base de espuma e são arredondadas para o mais próximo de ¼ pol. ou 0,5 cm. Números de itens da almofada e etiquetas da capa indicam o tamanho da cadeira de rodas para a qual a almofada é projetada para servir.

Almofada vida útil esperada: 5 anos

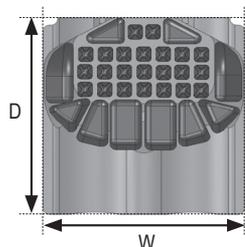

permobil | SEATING + POSITIONING

Mailing/Shipping Address:

1501 South 74th Street, Belleville, IL 62223-5900, USA

Administrative Offices:

100 North Florida Avenue, Belleville, IL 62221-5429, USA

U.S.: 800-851-3449 • Fax: 888-551-3449


Outside U.S.: 618-277-9150 • Fax: 618-277-6518

permobilus.com



Intertek

The products featured in this document were
manufactured under a Quality Management System
that is certified to ISO 13485:2016.

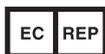

MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany

