


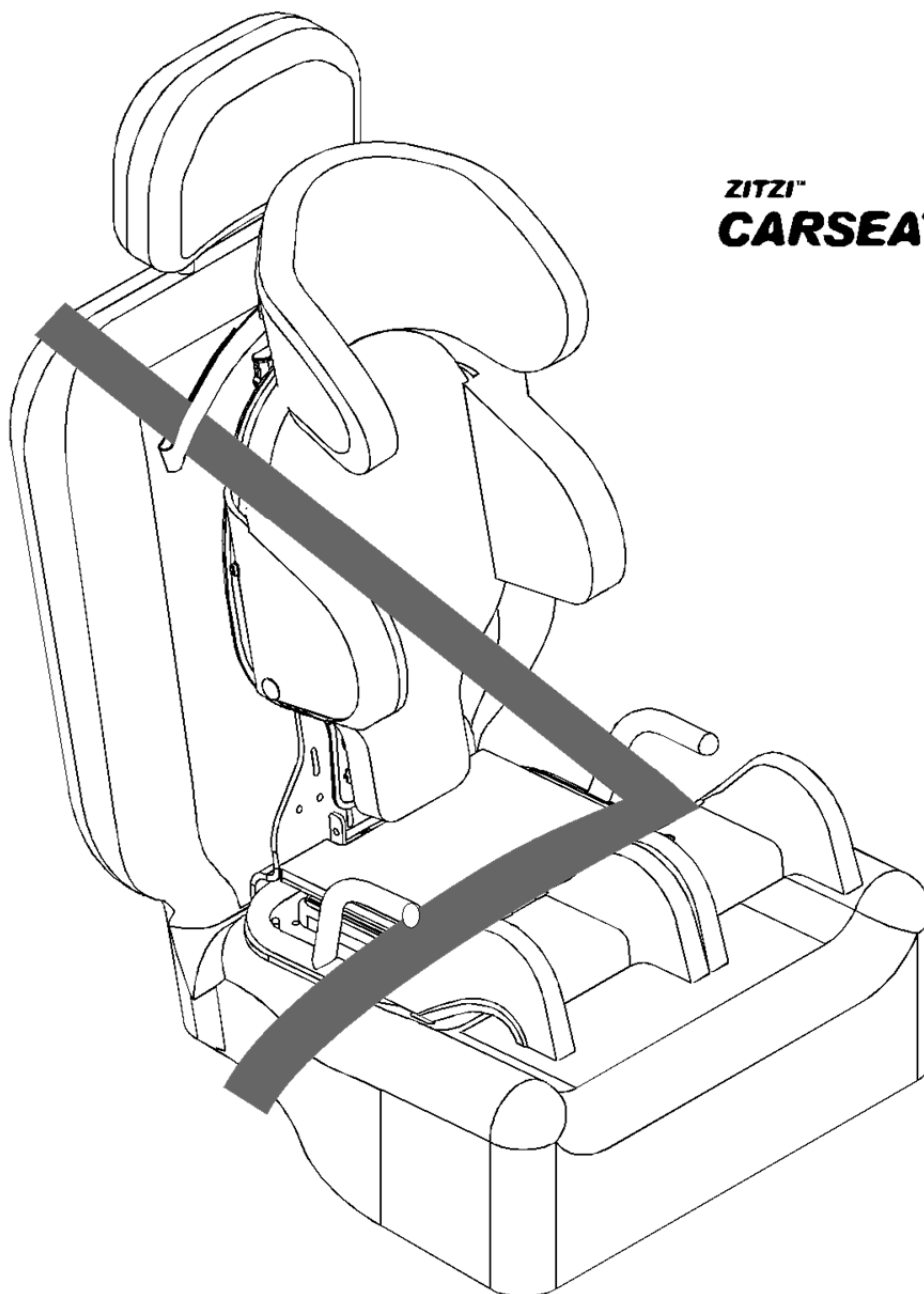

ZITZI"
CARSEAT PRO

Manual de Instruções

Zitzi Carseat Pro

Sumário

Segurança	3	Suporte lombar	11
Ferramentas	4	Patim	12
Cinto Traseiro	4	Cinto Pélvico	13
Assento	4	Montar a Série de Suportes	14
Diferença de comprimento de pernas	5	Mesa	15
Revestimento da parte da perna	5	Montar no Automóvel	16
Ajuste da inclinação do assento	5	Base Giratória	17
Abdução e adução	6	Instruções de Manutenção	18
Encosto	7	Cuidado e manutenção	18
Ajuste da parte traseira	7	Reciclagem	18
Reduzir a largura do encosto	7	Combinações	18
Ajuste do suporte lateral	8	Peças de substituição	18
Apoio de Cabeça	9	Marcação	18
Ajustar a altura do apoio de cabeça ..	9	Garantia	19
Ajustar a placa de suporte do apoio de cabeça lateralmente	9	Resumo e verificações	19
Suporte Pélvico	10	Materiais	19

Parabéns por escolher cadeira de carro Zitzi Carseat Pro. É uma cadeira segura que acompanha o crescimento e sabemos que funcionará bem por muito tempo. A segurança, conveniência e personalização foram importantes no desenvolvimento da Zitzi Carseat Pro.

Um pré-requisito para a cadeira de carro funcionar corretamente é que seja usada corretamente, por isso é importante que leia as instruções antes de usar a Zitzi Carseat Pro. Estas também devem ser guardadas para uso futuro.



Este produto destina-se apenas a ser utilizado como cadeira de automóvel fabricada pela Anatomic SITT AB.

Segurança



Zitzi Carseat Pro foi homologado de acordo com a atual segurança europeia (ECE R44.04) e adequa-se a crianças com um peso de 15-25 kg e 15-36 kg. Zitzi Carseat Pro sofreu testes de colisão montada virado para a frente na direção de condução, num assento de automóvel comum, com cinto de 3 pontos. Para ser montada num veículo personalizado, consulte a empresa de personalização para obter orientação sobre a montagem.


- Zitzi Carseat Pro pode ser usada nos bancos dianteiros e traseiros.
- Zitzi Carseat Pro pode ser usada apenas com o cinto normal de 3 pontos do automóvel.
- Zitzi Carseat Pro não pode ser usada sem a capa. A capa não deve ser por outra que não a fornecida pelo fabricante da cadeira pois é uma parte integral da segurança da cadeira de automóvel.
- Zitzi Carseat Pro deve ser sempre presa com o cinto, mesmo não estando a ser usada. Uma cadeira solta pode causar lesões em travagens bruscas.
- Certifique-se de que o cinto está sempre bem preso, e que a cadeira está montada segundo as instruções.
- Nenhum tipo de alteração pode ser feito à cadeira, pois pode afetar a segurança.
- Também não é permitido alterar o cinto do automóvel.
- NUNCA monte a Zitzi Carseat Pro num automóvel com o lado virado para a frente.
- Prenda SEMPRE o utilizador à cadeira, mesmo em viagens curtas.
- Verifique se a Zitzi Carseat Pro não fica entalada pelo banco, encosto ou porta do automóvel.
- NUNCA deve deixar objetos soltos na prateleira de trás do automóvel. Em travagens bruscas, podem saltar e causar lesões graves.
- Depois de um acidente a Zitzi Carseat Pro deve ser substituída. Mesmo que não pareça danificada, pode não proteger o utilizador da melhor maneira. Contacte a sua companhia de seguros.
- Nunca deixe uma criança sozinha no automóvel.
- Zitzi Carseat Pro pode aquecer num automóvel estacionado ao sol.
- Todos os cintos, quer na cadeira quer no automóvel, devem estar completos, bem presos e não torcidos.
- Se tiver instalado uma base giratória, verifique se está bem travada na direção de condução antes da viagem.
- Zitzi Carseat Pro NUNCA deve ser montada voltada para trás.
- Deve montar sempre na cadeira o cinto traseiro deve para evitar tensão desnecessária no produto.
- Guarde as instruções para poder usá-las mais tarde.

Ferramentas

Para fazer certas configurações na cadeira precisa de ferramentas. A maior parte pode ser feita com uma chave Allen de 4 mm.

Também pode usar a nossa chave em T.


Este símbolo indica que precisa de fazer alterações com uma chave Allen.

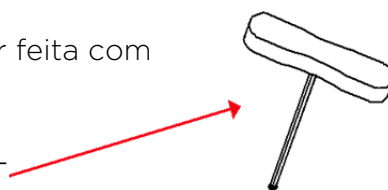

Cinto Traseiro

A cadeira vem com um cinto traseiro que é preso na base e passa em volta da parte de trás. O cinto serve para garantir que o encosto não se endireita mais do que deveria quando o utilizador é colocado na cadeira ou ao manusear a cadeira fora do automóvel.

Se necessário, o comprimento do cinto pode ser ajustado com as fivelas tri-glide para se adequarem ao utilizador.

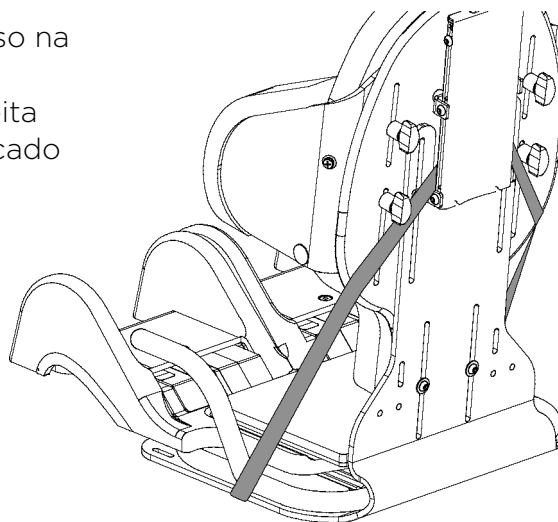


Deve montar sempre na cadeira o cinto traseiro para evitar tensão desnecessária no produto.

Assento


A profundidade do assento, a diferença do comprimento da perna e abdução / adução das pernas pode ser ajustada facilmente.

Remova o revestimento da placa do assento para chegar aos parafusos de ajuste. **Nota!** Não desaperte o parafuso completamente, desaperte-o apenas um pouco.

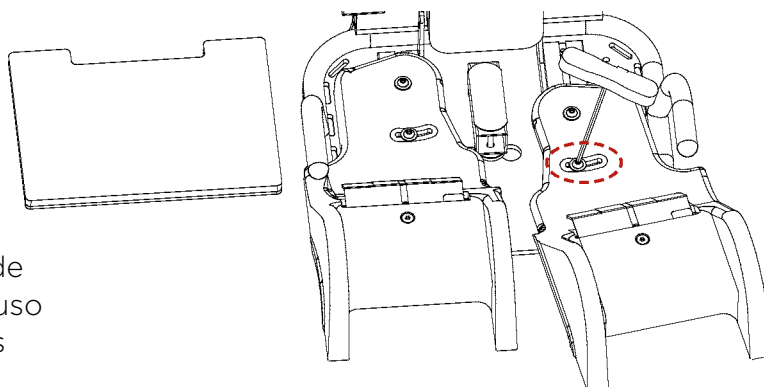

Diferença de comprimento de pernas


Desaperte o parafuso dianteiro com uma chave allen e desloque a parte da perna para a posição desejada. Volte a apertar os parafusos quando estiver na posição correta.

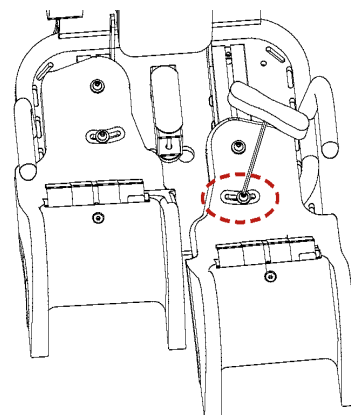

Revestimento da parte da perna

Primeiro, levante o revestimento para ter acesso ao botão que mantém o revestimento da parte da perna no lugar. Depois, solte o revestimento do botão.

Cada perna possui dois revestimentos. A direita possui dois revestimentos marcados com “Right” e a esquerda, dois revestimentos marcados com “Left” (visto de trás, com a Carseat Pro à sua frente)

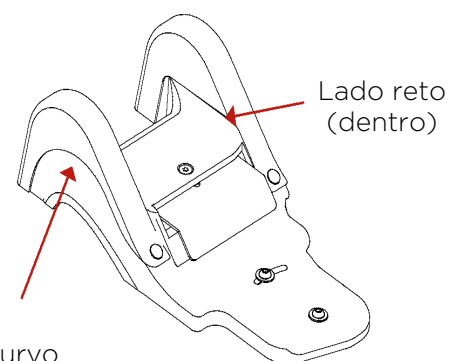

A parte curva da parte da perna deve ficar sempre para fora e a parte reta deve ficar sempre para dentro.



Ajuste da inclinação do assento

Ao ajustar a profundidade do assento, deve também ajustar a inclinação.





Exemplo Se a profundidade do assento for ajustada para 24 cm (barra cinzenta no tamanho 2) a inclinação deve também ser ajustada para obter a inclinação correta e um posicionamento adequado.

Desaperte o parafuso da parte da perna usando a chave T. Ajuste a inclinação do assento e volte a apertar o parafuso.

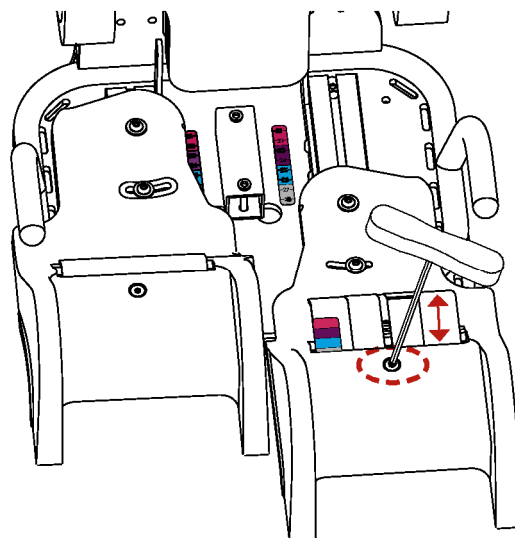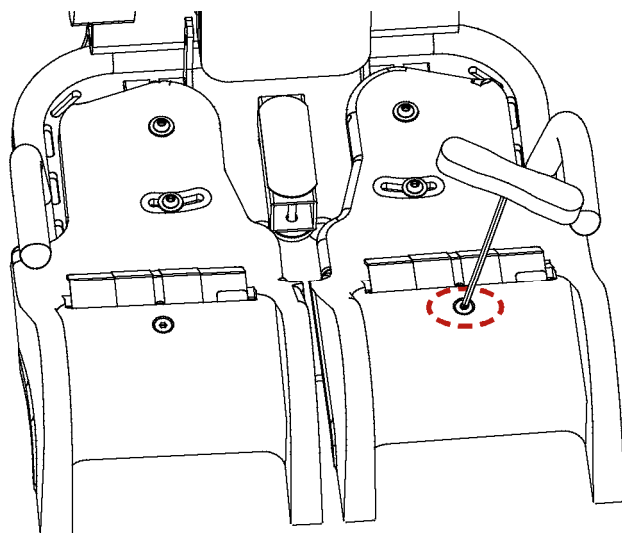


Abdução e adução


Desaperte o parafuso dianteiro na parte da perna usando a chave. Mova a parte da perna para a posição desejada e volte a apertar os parafusos quando estiver na posição correta.

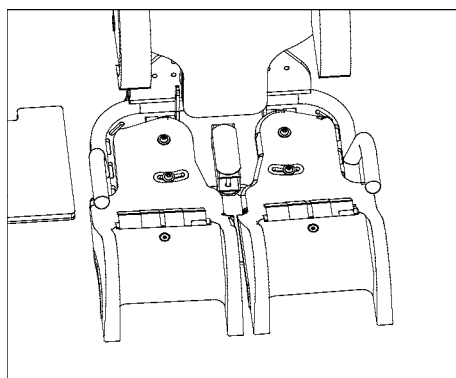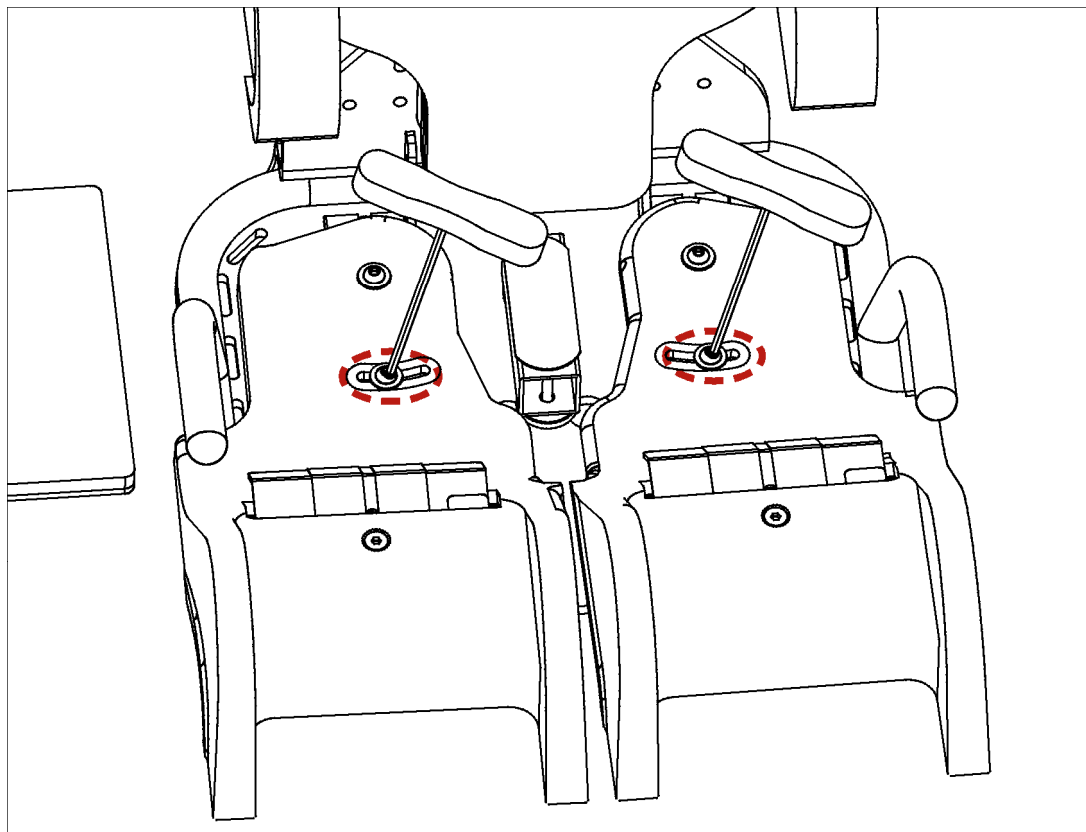

Neutra

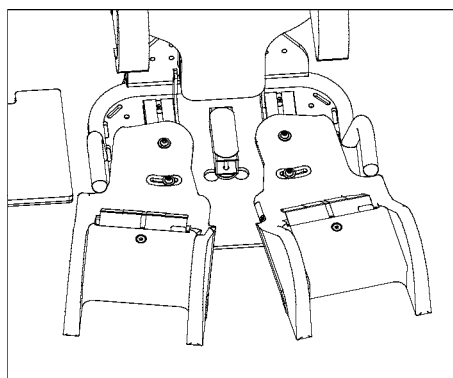

Abdução

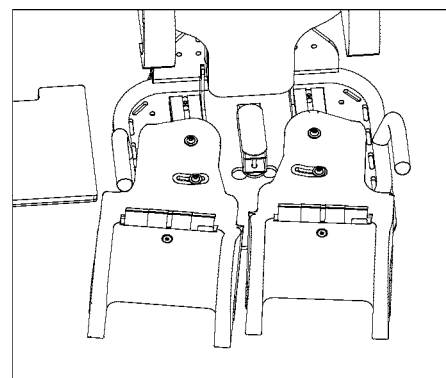


Adução / Rajada de vento

Encosto

Ajuste da parte traseira

Desaperte os parafusos assinalados a vermelho (4) usando a chave e depois ajuste a altura desejada.


Volte a apertar os parafusos quando atingir a Altura desejada.

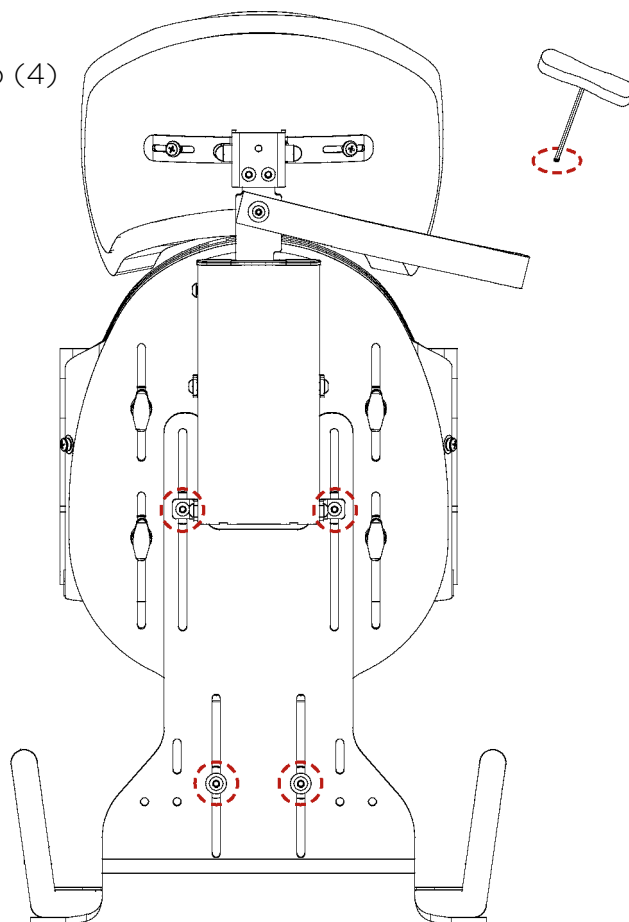

Reduzir a largura do encosto

Para reduzir a largura do assento, retire a placa traseira e o forro do seu Carseat Pro.


Depois, remova um máximo de 2 cm da placa traseira. Pode cortar apenas a parte do tronco, ou toda a placa.

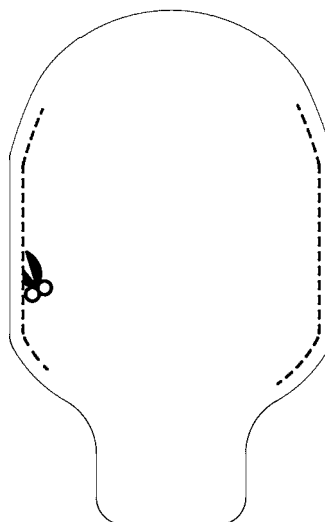

IMPORTANTE! Nunca retire mais de 2 cm da placa traseira.

Ajuste do suporte lateral


Desaperte os parafusos borboleta assinalados a vermelho (4) e depois ajuste a largura, ângulo e altura desejados. Volte a apertar os parafusos depois de fazer os ajustes.

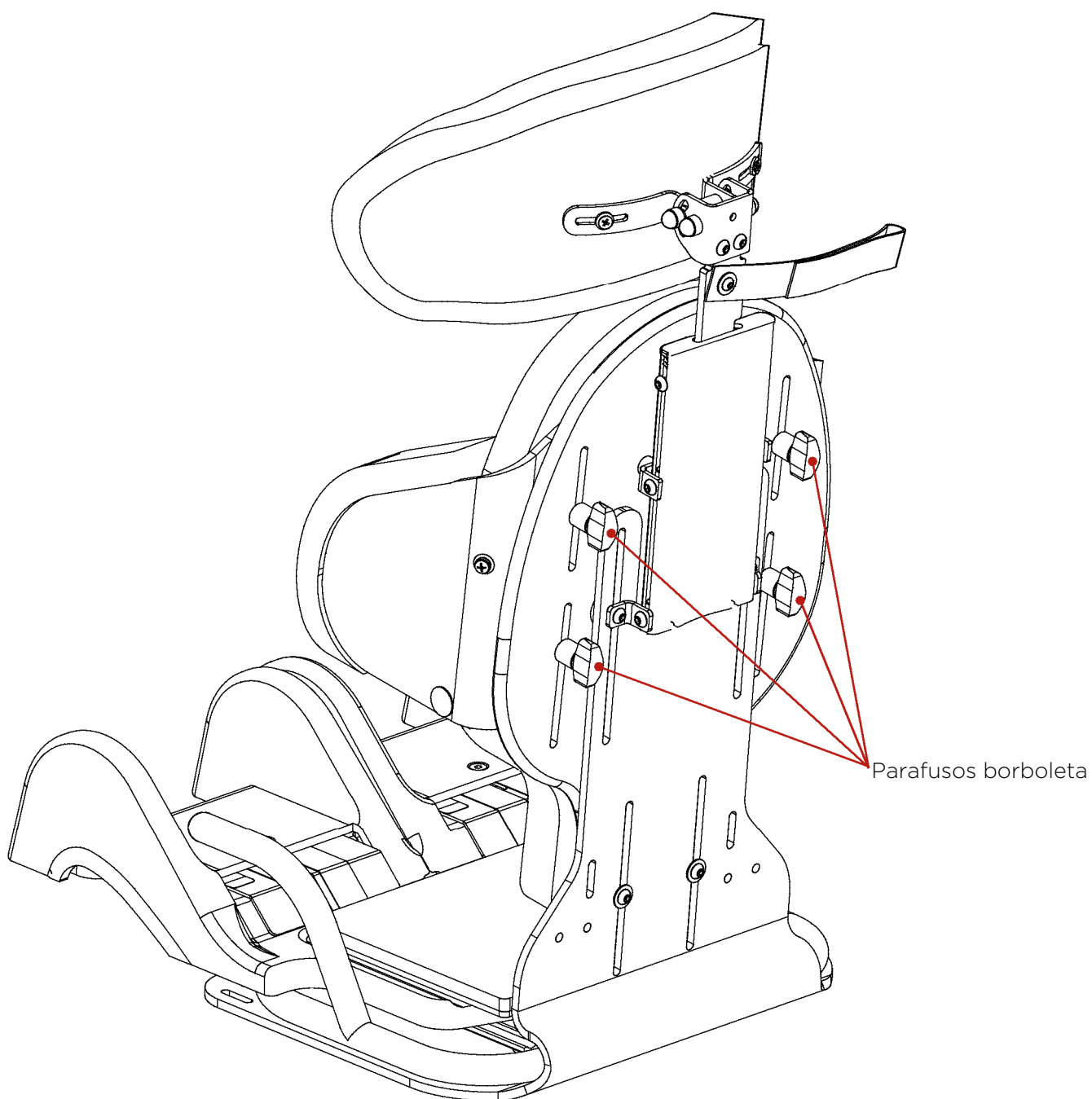

Apoio de Cabeça



Ajustar a altura do apoio de cabeça

- Desaperte o parafuso de ajuste (A).
- Ajuste a altura desejada.
- Por razões de segurança, é impossível remover o apoio de cabeça.
- Aperte o parafuso de ajuste.

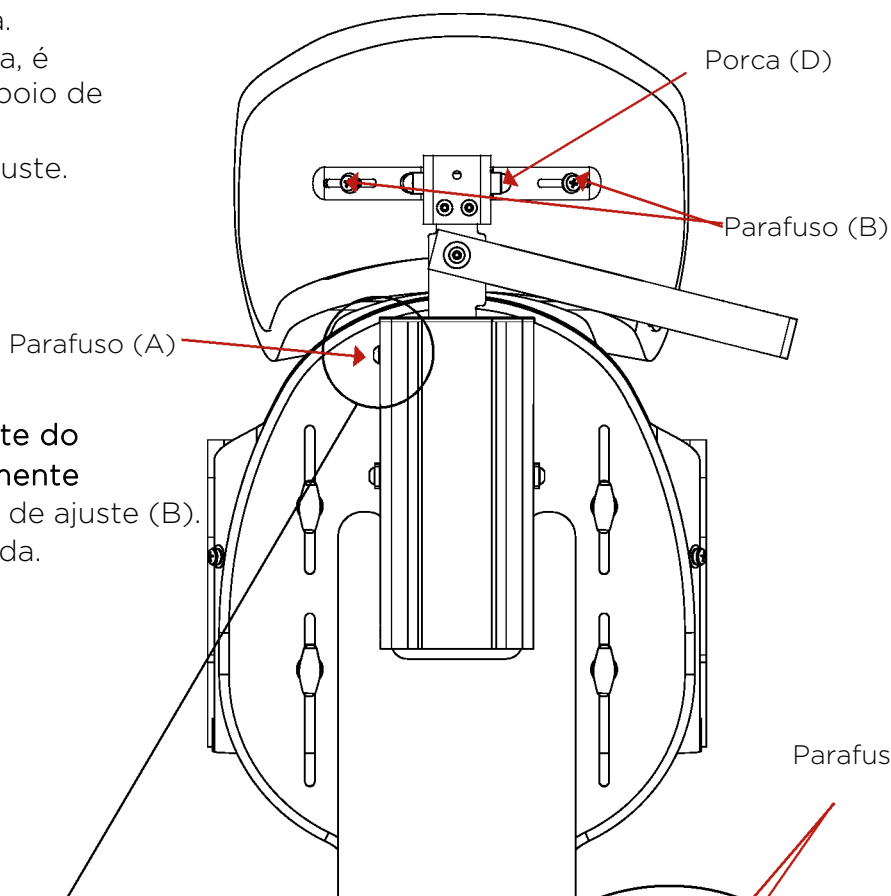

Ajustar a placa de suporte do apoio de cabeça lateralmente

- Desaperte os parafusos de ajuste (B).
- Ajuste a posição desejada.
- Aperte os parafusos.

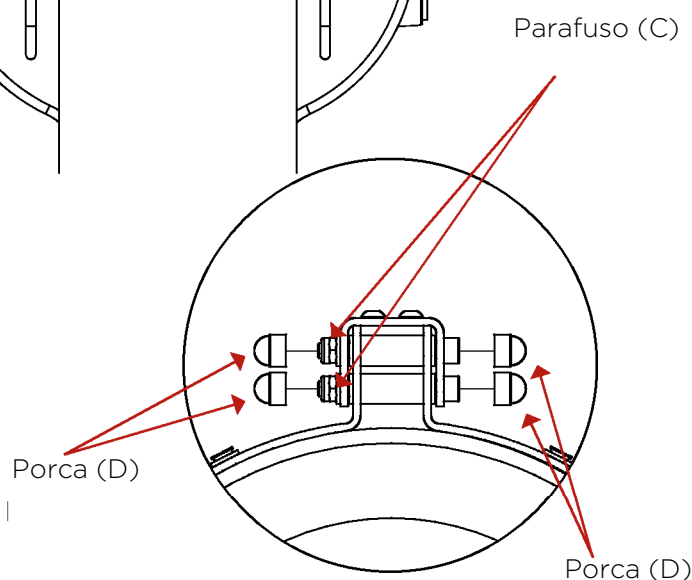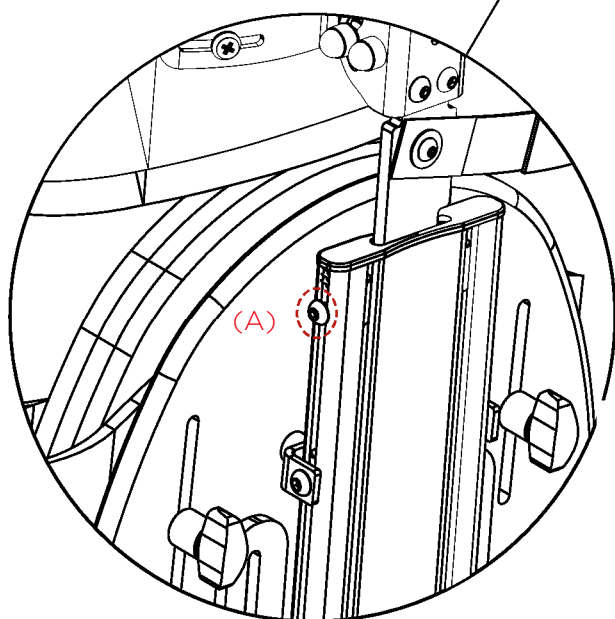

Ajustes


- Retire as porcas de acabamento (D).
- Desaperte os parafusos de ajuste (C).
- Ajuste a altura e ângulo desejados.
- Aperte os parafusos (C).
- Volte a colocar as porcas (D).

Suporte Pélvico

O suporte pélvico é montado nos encaixes de suporte pélvico da cadeira com os parafusos, porcas e anilhas incluídos, conforme imagem. Aperte os parafusos depois da montagem.



NOTA! Os suportes pélvicos devem ser colocados dentro do tubo de segurança.

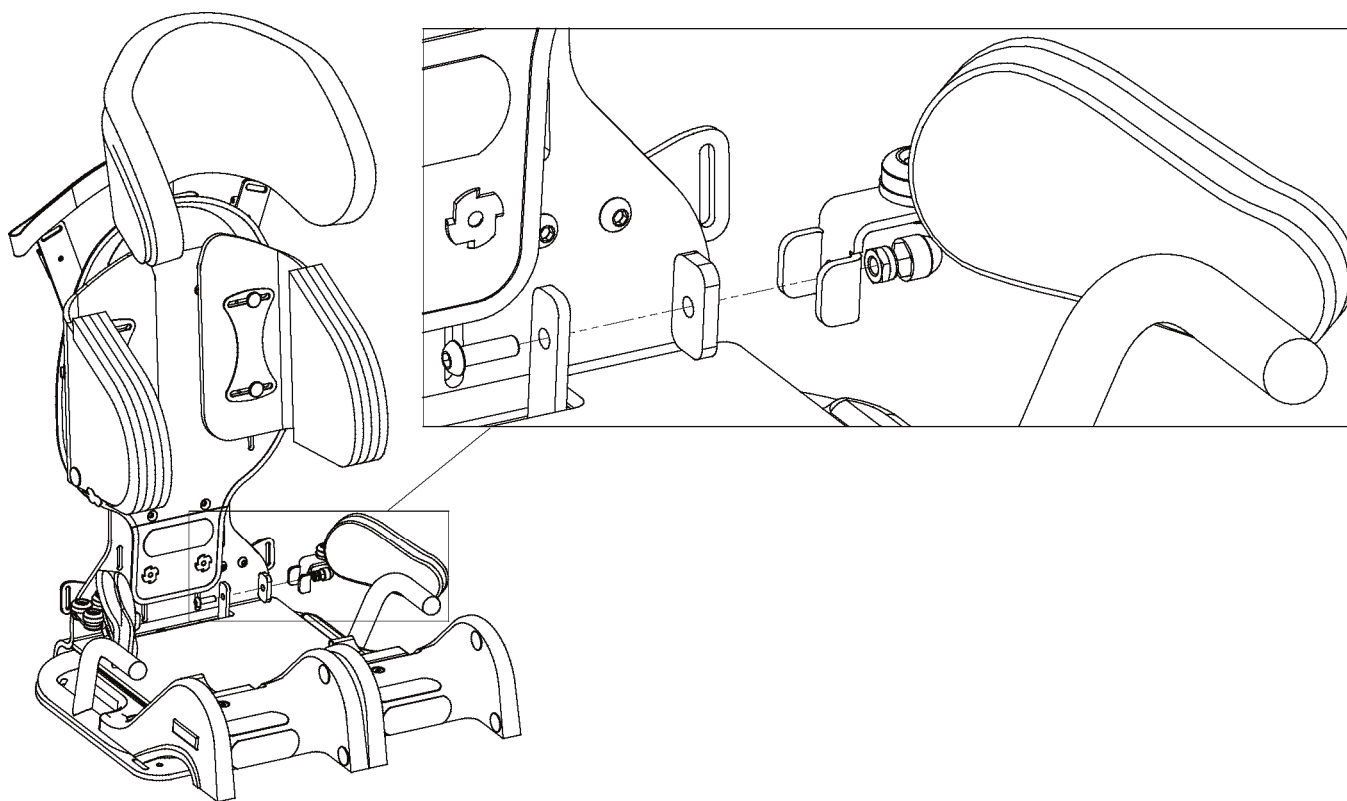


Suporte Lombar

Acessórios extra, suporte lombar insuflável com bomba

Antes de montar o suporte lombar, ajuste o encosto como descrito anteriormente.

- Remova o forro do encosto
- Prenda o suporte lombar dentro do forro do encosto (aproximadamente no local assinalado a vermelho na figura abaixo) com a ajuda do velcro.
- Volte a colocar o forro.

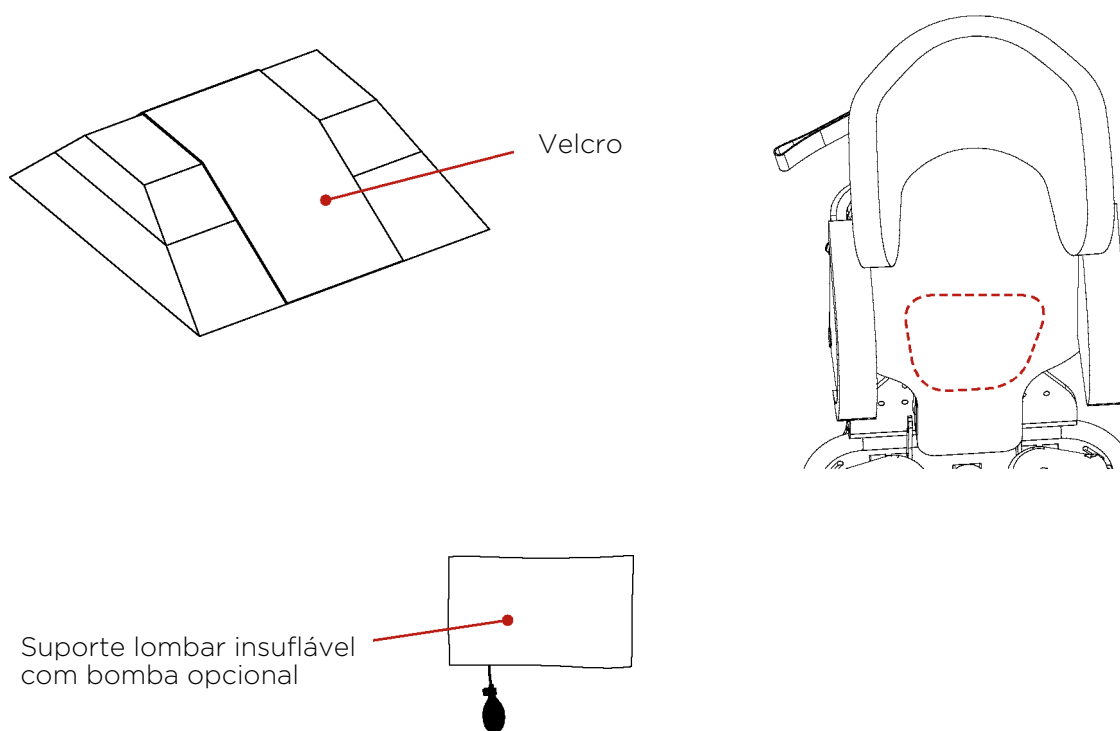


Patim

O velcro incluído deve ser colado à parte de baixo da Carseat Pro. (Fig. 1). A borda interior do velcro deve estar alinhada com os buracos atrás, conforme mostra a figura.

Primeiro, coloque o patim no assento (Fig. 2).

Depois, coloque a sua Carseat Pro na parte de cima da superfície do patim e o mais próximo possível do encosto. Certifique-se de que o Velcro fica bem preso um ao outro.

Fig. 1

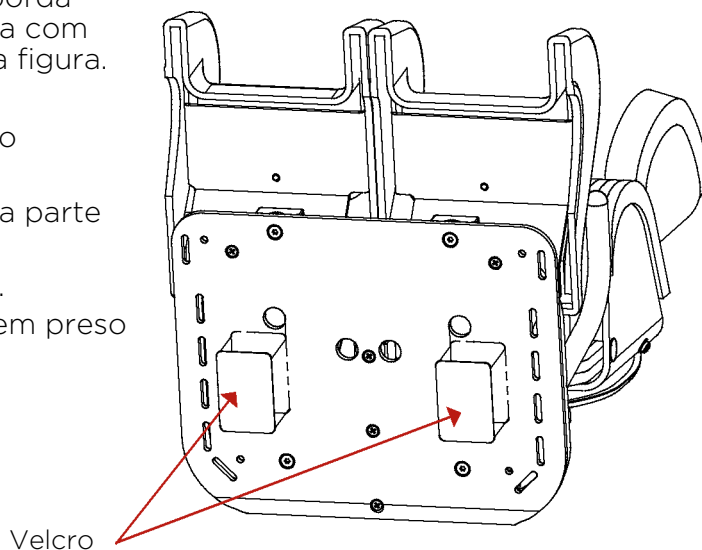


Ajustar o patim

O patim da Carseat pro é dobrável.

Para ajustar a altura do patim, desaperte o parafuso e coloque-o na altura desejada.



Fig. 2

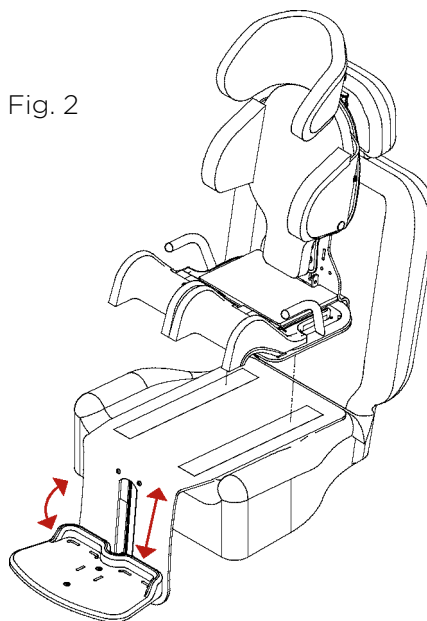

Cinto Pélvico


Substituir o cinto pélvico

Parre as tiras pelas ranhuras assinaladas a vermelho na placa usando o método Triglide (E).

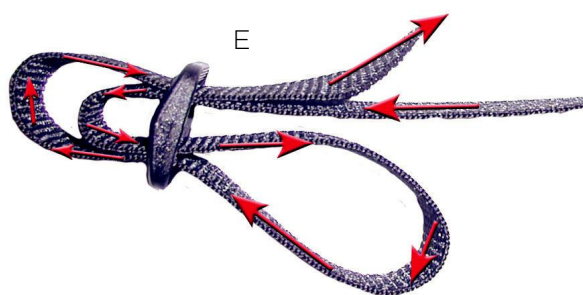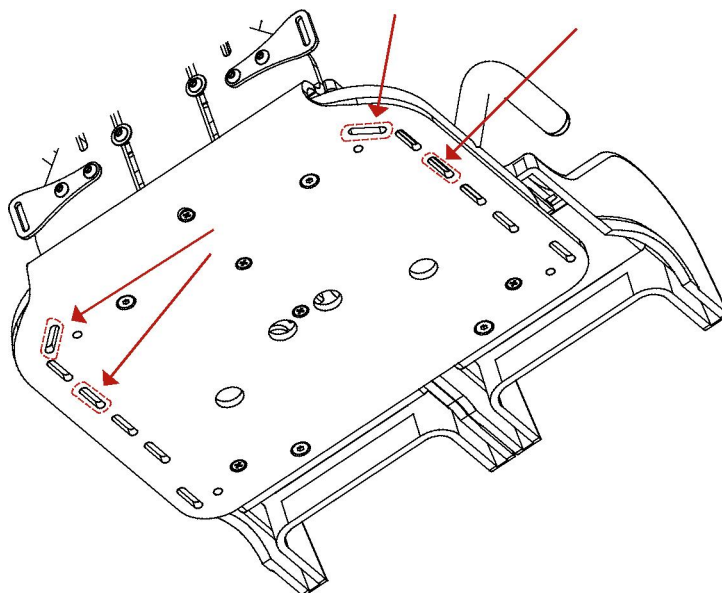

NOTA! Não se esqueça de usar o cinto de segurança!

Montar a Série de Suportes

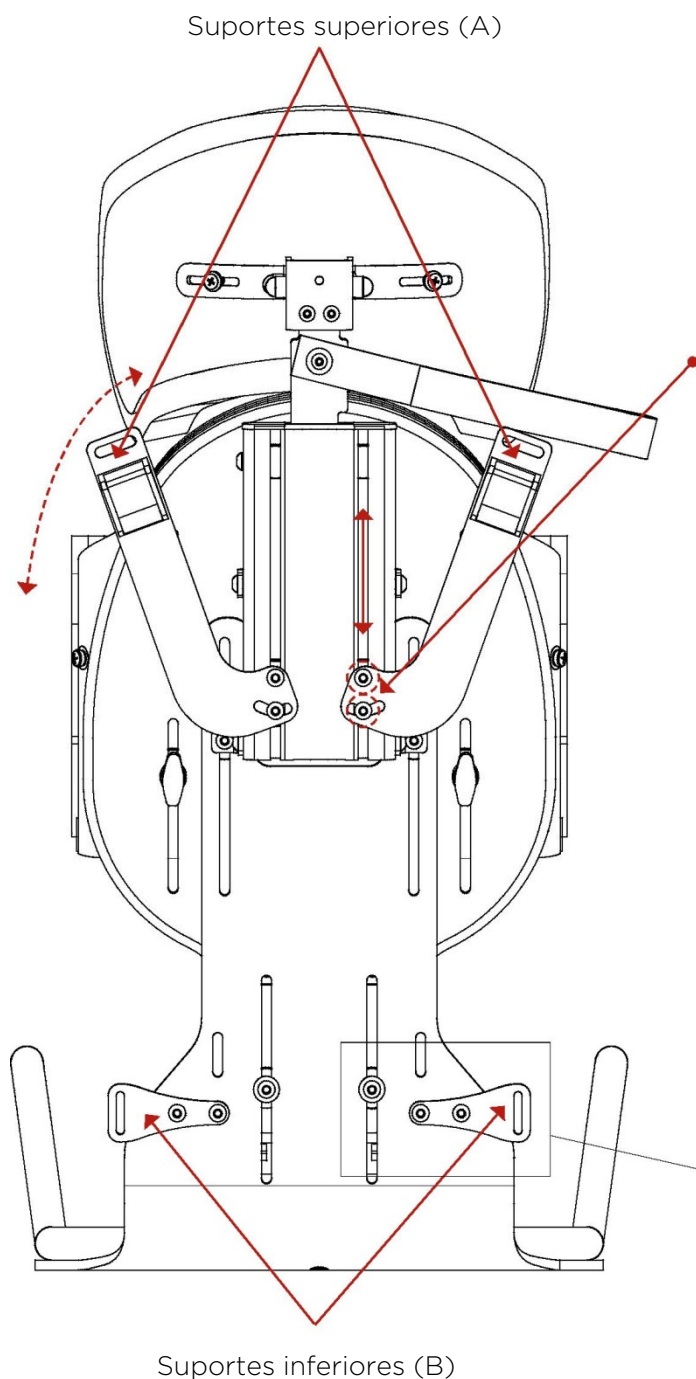

Instalar os suportes superiores (A)

Empurre os suportes de montagem pela parte inferior das ranhuras no perfil para a posição desejada. Aperte os parafusos.

Ajustar o suporte superior (A)

Desaperte os parafusos e ajuste a altura e ângulo desejados. Ajuste a altura do suporte, de modo que a direção de puxar fique um pouco acima do ombro. Aperte os parafusos.

Montar os cintos

Passe as tiras pela ranhura superior e pela fivela. Passe os pontos de fixação inferiores do cinto pelo suporte inferior. Use as fivelas Triglide incluídas (E).



Suporte inferior (B)

Monte os suportes de montagem inferiores com os parafusos, porcas e anilhas incluídos como mostra a figura (2). Aperte os parafusos.

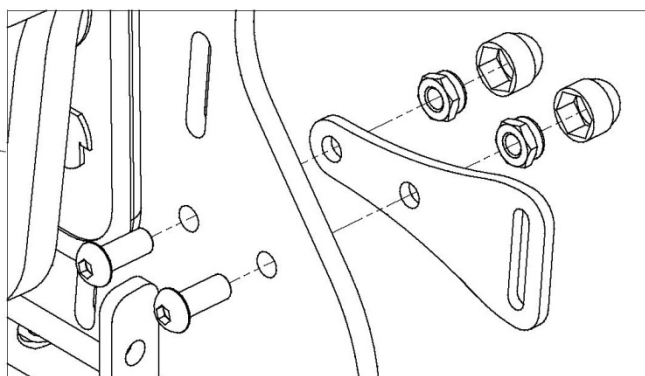


Figura (2)




AVISO! Certifique-se de deixar espaço suficiente para o pescoço. Verifique também a pressão das tiras e almofadas do cinto e de que estão onde deveriam estar.

Mesa


A mesa é colocada nos joelhos do paciente e montada com velcro (1) e (2) presa à sua Carseat Pro conforme figura abaixo. O utilizador pode usar a mesa como apoio de braço, quando desejável.



NOTA! Certifique-se de que a mesa não está demasiado justa ao estômago do paciente, e de que está bem presa.

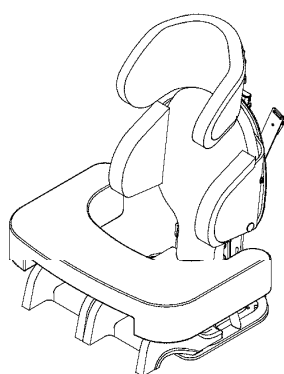

Velcro na parte da frente da mesa

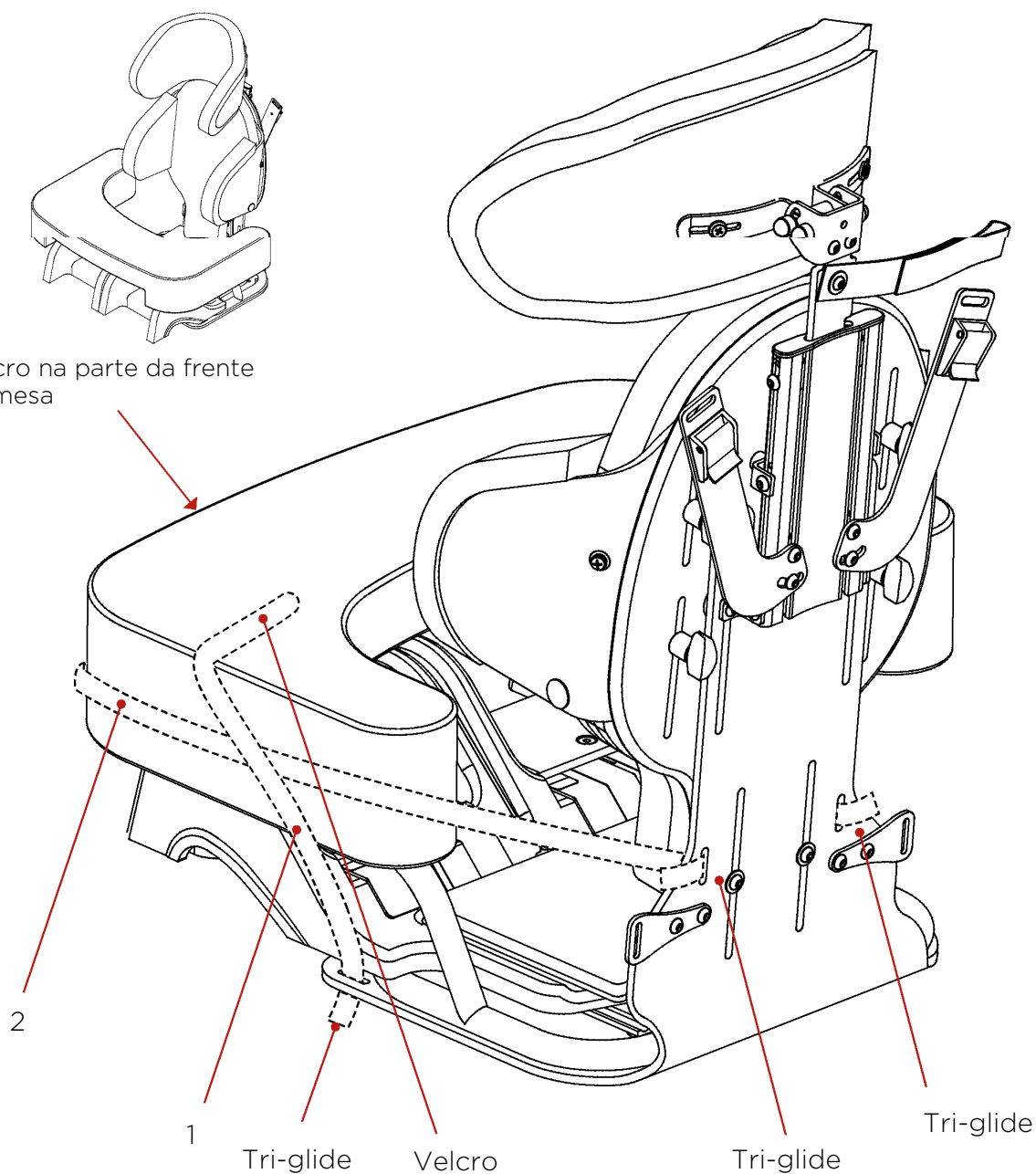


Montar no Automóvel

- A Zitzi Carseat Pro deve sempre ser usada em conjunto com o cinto de 3-pontos do carro.
- O cinto deve ser colocado como mostra a figura.
- Coloque a Zitzi Carseat Pro no assento.
- Certifique-se de que a Carseat Pro está centrada.
- Coloque a criança na Carseat Pro.
- Passe o cinto de segurança em volta da criança. O cinto pélvico deve ficar em volta das ancas da criança, debaixo dos encaixes vermelhos (A).
- Passe o cinto pelo eixo (junto do ombro).
- Depois, aperte o cinto, de forma a ficar bem justo.
- Solte a criança soltando o cinto de segurança. A Zitzi Carseat Pro pode ser deixada no carro, mas deve estar Presa pelo cinto de segurança.

Use sempre o suporte do cinto
É muito importante passar sempre o cinto de segurança pelo suporte.

Estrutura tubular inferior

O cinto deve passar debaixo dos encaixes como mostra e depois prender no encaixe.

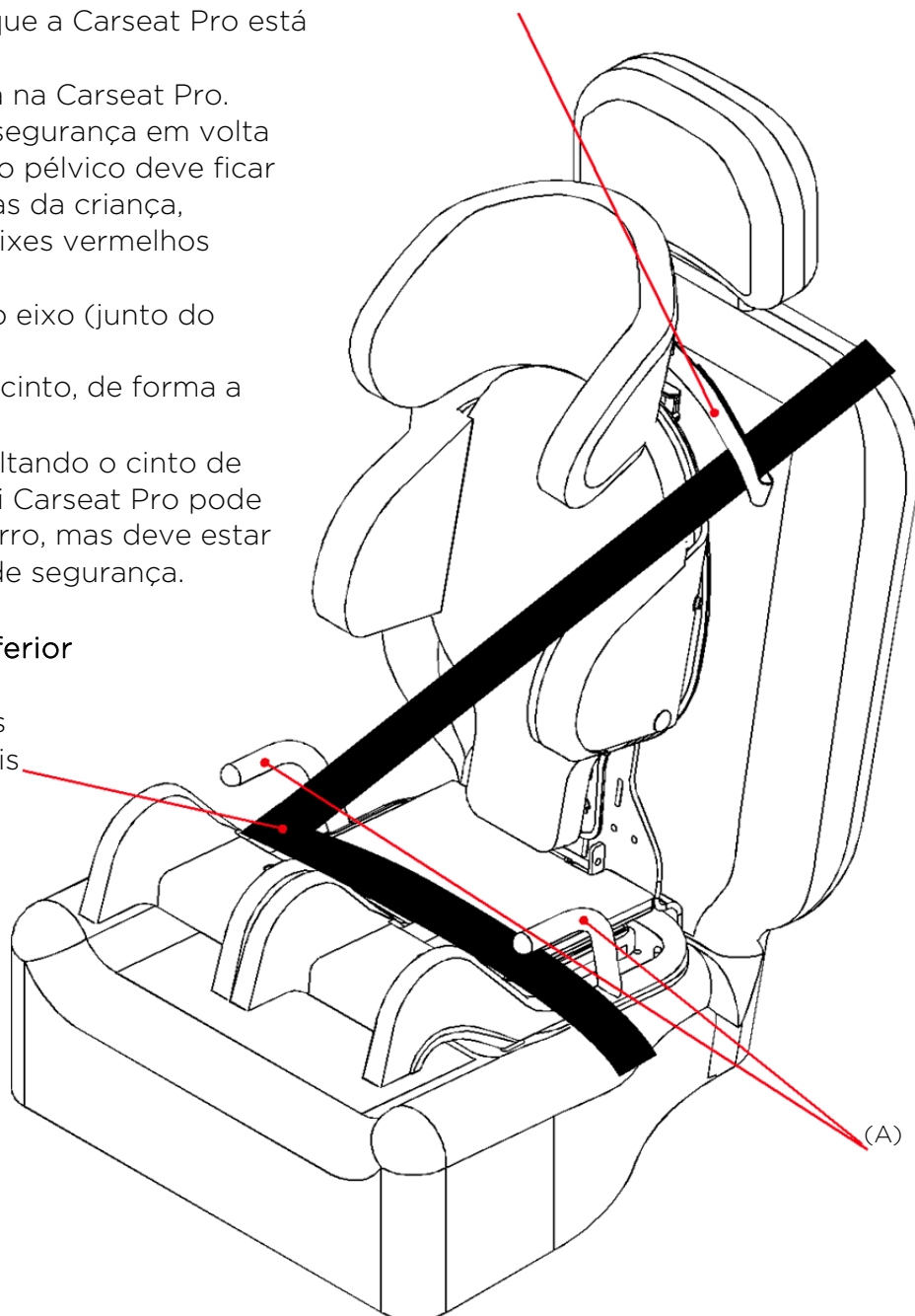

NOTA! Quanto mais justo o cinto, mais segura ficará a criança em caso de acidente. Se possível, certifique-se de que não há nenhum casaco entre o cinto e as ancas da criança.


Base Giratória

A base giratória é presa à parte de baixo da Carseat Pro usando os parafusos (1), anilhas (2) e porcas (3) incluídos, conforme mostra a figura. As porcas de acabamento (4) são colocadas após a montagem.


Coloque a base no assento e certifique-se de que o encosto da sua Carseat Pro está o mais perto possível do encosto do carro. A parte traseira da base giratória pode ser posicionada de forma que entre no assento entre o assento e o encosto.

Para virar a sua Carseat Pro para uma melhor posição de entrada e saída, puxe o botão (assinalado a vermelho na figura) para cima para o soltar e vire a cadeira.


Pode bloqueá-la em duas posições - com a sua Carseat Pro voltada para a frente ou de lado para o assento (posição de entrada e saída).

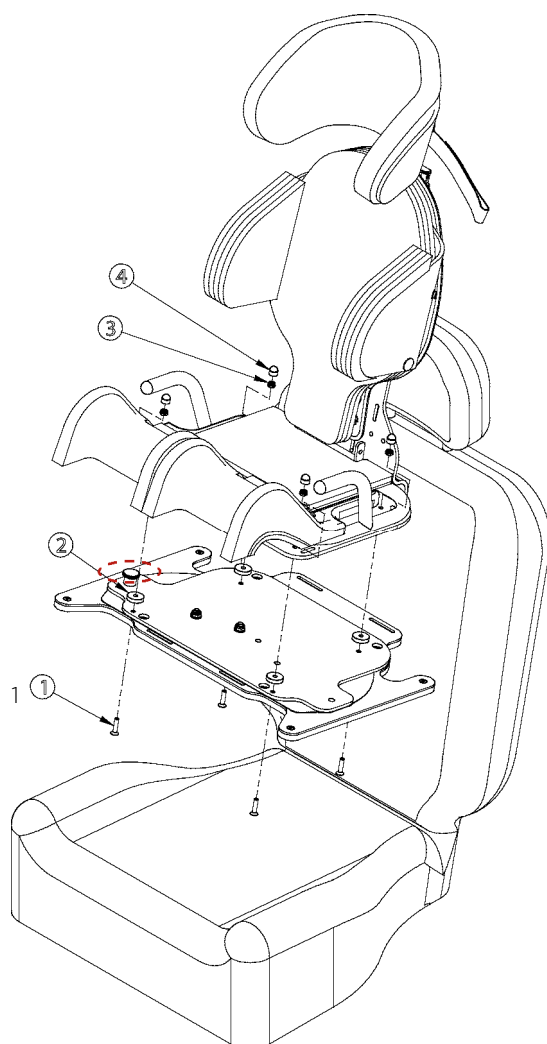

Zitzi Carseat Pro
montada na base giratória
num automóvel.

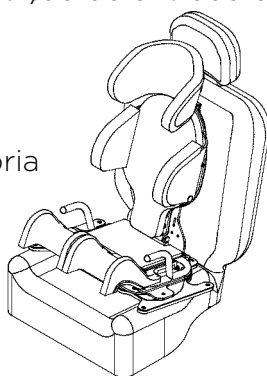

NOTA! Certifique-se sempre de que a base está bloqueada antes da entrada e saída e antes do início da viagem.

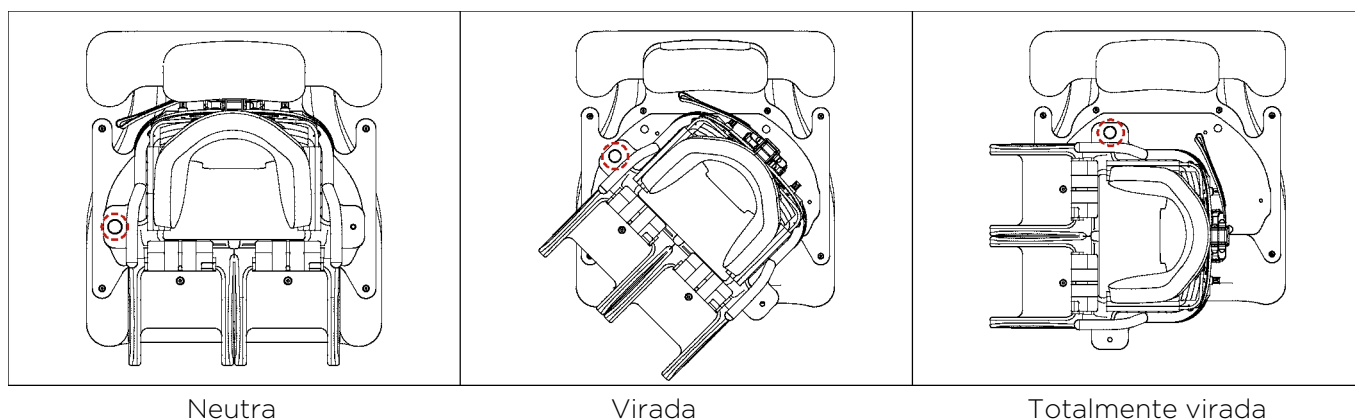

Neutra

Virada

Totalmente virada

Instruções de Manutenção

Cuidado e Manutenção

Almofada e almofadas de cinto: 60°, lavagem a frio. Não seque na máquina de secar. Partes de plástico e metal: Limpe a sujidade com um pano húmido. A manutenção deve ser realizada com intervalos regulares e quando necessário. Não se esqueça de retirar partes de tecido e forro antes de limpar. Pense no meio ambiente! Por favor, use agentes desengordurantes biodegradáveis. Verifique todas as partes móveis quanto a danos e troque-as se necessário. Se tiver alguma dúvida, não hesite em contactar-nos pelo telefone +46 11 16 18 00 ou pelo email info@anatomicsitt.com.

Reciclagem

Peça ou produtos usados devem ser desmontados e descartados. As peças devem ser separadas por tipo de material, metal, plástico e combustíveis (têxteis) (consulte a próxima página).

Combinações

Zitzi Carseat Pro é um produto aprovado ECE que pode ser combinado com todos os acessórios descritos neste manual. A Zitzi Carseat Pro NÃO pode ser combinada com outros produtos.


Peças de Reposição

Apenas podem ser usadas peças distribuídas pela Anatomic SITT AB.

Marcação

Zitzi Carseat Pro com os seus acessórios é um produto aprovado pela ECE. Um número de série exclusivo está localizado na parte inferior da placa traseira (ver a área assinalada a vermelho na figura). Este número de série deve ser indicado em toda a correspondência relativa ao produto.

- Esta é uma cadeira de automóvel universal. É aprovada pelo regulamento ECE no. 44.04 para uso geral em veículos e é adequada para a maioria dos assentos de automóveis, mas não para todos.
- A fixação adequada pode ser alcançada se o fabricante do veículo reconhecer, no manual do veículo, que está adaptado para a incorporação de uma cadeira universal para o grupo de peso especificado.
- Esta cadeira foi classificada como universal sob condições mais rigorosas do que as usadas em versões anteriores de cadeiras para crianças que não possuem este certificado.
- Em caso de dúvida, contacte o fabricante desta cadeira ou o seu distribuidor.

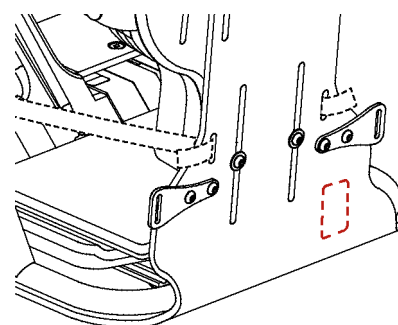

Garantia

1 ano para defeitos de fabrico, com vigência a partir da data da compra. Garantia apenas em produtos que não foram alterados pelo proprietário. A garantia não se aplica a produtos que tenham sido expostos a uma colisão ou incidente semelhante.

Resumo e Verificações

Continue a fazer regularmente as verificações descritas no respetivo ponto:

- Verifique regularmente se todos os parafusos estão bem apertados.
- Verifique regularmente os desgastes das correias e almofadas.
- Pode verificar os pontos acima sempre que o utilizador usar a Zitzi Carseat Pro.

Materiais

- **Metal**
Tubo de segurança, perfis, suporte do patim, suporte do apoio de cabeça, encaixes do suporte pélvico, reforço da parte das pernas, suporte de ajuste de inclinação do assento.
- **Plástico**
Parte do assento e encosto, mesa, plataforma do patim, partes das pernas, suportes laterais e almofada do apoio de cabeça.
- **Combustível**
Forro e cinto pélvico.

SE

Anatomic SITT AB (tillverkare)
Box 6137, SE-600 06 Norrköping, Sweden
Tel +46 11 16 18 00
Fax +46 11 16 20 05

Besöksadress
Terminalgatan 1, SE-602 29 Norrköping, Sweden

DK

Anatomic SITT A/S
Viengevej 4, 8240 Risskov,
Denmark Tel +45 86 17 01 74 Fax
+45 86 17 01 75

FI

Rehaco OY
Haaransuontie 6 A7, 90240 Oulu,
Finland Tel: +35 840 775 22 88

NL

Anatomic SITT Nederland BV
Postbus 6027 / 4000 HA Tiel, Netherlands
Tel +31 344 63 45 40
Fax +31 344 62 33 61

World wide

anatomicsitt.com
info@anatomicsitt.com
facebook.com/anatomicsitt
youtube.com/anatomicsitt

