



VICAIR®

the best in body support

VICAIR® LIBERTY TC

PT

Manual do utilizador

CE

MODELO PADRÃO DISPONÍVEL



Liberty TC

TAMANHOS PADRÃO DISPONÍVEIS

cm	polegadas
43x43	17x17
50x45	20x18

* Largura x Profundidade



fig. A



fig. C

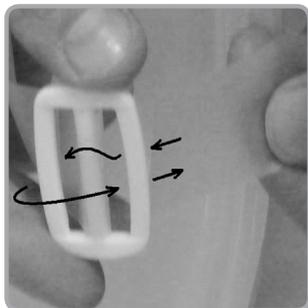


fig. B

INTRODUÇÃO

A sua Vicair® Liberty TC foi concebida para ser utilizada como descrito neste manual. Leia todo o manual antes de utilizar.

A almofada consiste nas seguintes partes:

Almofada

A almofada interior é fabricada num saco de polivinil de fabrico especial, cheio com um número específico de SmartCells™ triangulares cheias de ar e uma pequena quantidade de lubrificante. A Vicair Liberty TC possui dois compartimentos cada um com uma válvula na extremidade traseira.

Cintas

Esta almofada inclui quatro cintas. Pode utilizar duas cintas para fixar a almofada à sanita e duas cintas podem ficar de reserva.

MONTAGEM

Verificação do tamanho da almofada

Juntamente com o seu terapeuta ou revendedor, certifique-se de que a almofada se adapta às dimensões do seu corpo e da sua sanita.

Ajuste da almofada à sanita

- Remova o invólucro transparente de plástico.
- Coloque a almofada na sanita. Os pictogramas de instrução da almofada devem estar voltados para baixo. A válvula deve estar na extremidade traseira (fig. A).
- Instale ambas as cintas à esquerda e à direita da sanita (fig. B, C).

UTILIZAÇÃO

Utilização a altitude elevada

Dado que as SmartCell™ estão cheias de ar, a almofada pode ficar mais firme e ter diferentes comportamentos quando utilizada a uma altitude elevada ou num avião. A Vicair recomenda que não se utilize a almofada acima dos 2400 m (8000 pés) ASL (acima do nível do mar).

Transferência da almofada para outro utilizador

Antes de permitir que uma segunda pessoa utilize a almofada, limpe-a.

Inflamabilidade

Não utilize nem deixe a almofada perto de chamas expostas ou de fontes de calor com elevada temperatura.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

 **Atenção:** Não utilize vapor nem autoclave para limpar a almofada. A almofada não suporta calor ou pressão excessivos.

Verificação de células gastas ou vazias

De três em três meses, verifique se a almofada tem células gastas ou vazias. No caso de danos graves ou de um grande número de células vazias, interrompa a utilização da almofada. Consulte o seu revendedor.

Limpeza da almofada

- Limpe a almofada com um pano húmido e detergente suave.
- Não utilize produtos de limpeza agressivos ou abrasivos ou objetos afiados para limpar a almofada.
- Não lave a almofada numa máquina de lavar.

Desinfecção da almofada

No caso de sujidade com fluidos corporais e ao transferir a almofada para outro utilizador, a almofada deve ser desinfetada para evitar contaminação cruzada.

- Limpe a almofada como acima descrito. Utilize preferivelmente um agente antibacteriano.
- Pulverize com desinfetante a almofada.

GARANTIA

A Vicair oferece uma garantia limitada contra defeitos de mão de obra e materiais por um período de dois (2) anos desde a data original de compra, desde que o produto tenha sido utilizado normalmente. Qualquer dano decorrente de uma utilização anómala ou provocado por um manuseamento, limpeza indevidos ou negligência são excluídos desta garantia. No caso de ocorrer um defeito de material ou de mão de obra no prazo de dois (2) anos a partir da data original de compra, a Vicair irá, a seu exclusivo critério, reparar ou substituir o produto gratuitamente. As soluções por violação das garantias expressas no presente são limitadas à reparação ou substituição do produto. Em caso algum esses danos por violação de qualquer garantia incluem quaisquer danos consequenciais ou excedem o custo de não conformidade das mercadorias vendidas.

Para informação adicional do produto, consulte o nosso website: www.vicair.com.

WWW.VICAIR.COM

**VICAIR BV
Bruynvisweg 5
1531 AX Wormer
Países Baixos**

**T +31(0)75 642 9999
F +31(0)75 642 9990**

E-mail info@vicair.com

