


Folha de dados do produto

Introdução

O Espaldar Vicair® Strap back é um suporte posterior flexível almofadado concebido para utilização com o Espaldar Vicair® Liberty back ou Espaldar Vicair® Anatomic back. Pode ser utilizado na maioria dos tipos de cadeiras de rodas simples a complexas. A compatibilidade pode ser verificada junto do seu consultor técnico.

Vista explodida

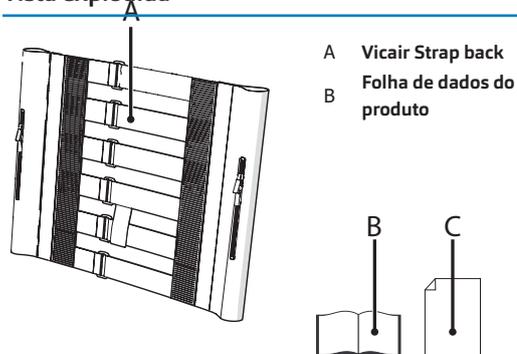

Especificações gerais do produto

Nome do produto: Vicair® Strap back
Fabricado por: Vicair BV, Países Baixos
Garantia: 24 meses
Materiais utilizados: Tecido e cintas de nylon. Tudo isento de látex.



Mínimo 15 kg
Máximo 150 kg



Mínimo -20 °C
Máximo 55 °C



50 m (164 pés)
abaixo do nível
do mar

2400 m (8000
pés) acima do
nível do mar



Mínimo 0%
Máximo 100%

Dimensões em cm		Dimensões em polegadas		Vicair Strap back		Utilizado com almofada traseira da Vicair®		Peso
Largura	Altura	Largura	Altura	Número do artigo	Código do artigo	Vicair Liberty back	Vicair Anatomic back	Apr.
30	32	12	12¾	24300132	SB0132	-	AABC/AX/3032	0,2 kg
35 - 40	32	14 - 16	12¾	24300232	SB0232	LBC/1	AABC/AX/3532 - AABC/AX/4032	0,2 kg
45 - 50	32	18 - 20	12¾	24300332	SB0332	LBC/3	AABC/AX/4532 - AABC/AX/5032	0,2 kg
43	32	17¼	12¾	24300432	SB0432	LBC/2	-	0,2 kg
30	40	30	16	24300140	SB0140	-	AABC/AX/3040	0,2 kg
35 - 40	40	35 - 40	16	24300240	SB0240	-	AABC/AX/3540 - AABC/AX/4040	0,2 kg
45 - 50	40	45 - 50	16	24300340	SB0340	-	AABC/AX/4540 - AABC/AX/5040	0,2 kg
30	48	30	19¼	24300148	SB0148	-	AABC/AX/3048	0,2 kg
35 - 40	48	35 - 40	19¼	24300248	SB0248	-	AABC/AX/3548 - AABC/AX/4048	0,2 kg
45 - 50	48	45 - 50	19¼	24300348	SB0348	-	AABC/AX/4548 - AABC/AX/5048	0,2 kg
30	56	30	22½	24300156	SB0156	-	AABC/AX/3056	0,2 kg
35 - 40	56	35 - 40	22½	24300256	SB0256	-	AABC/AX/3556 - AABC/AX/4056	0,2 kg
45 - 50	56	45 - 50	22½	24300356	SB0356	-	AABC/AX/4556 - AABC/AX/5056	0,2 kg

Precauções e instruções de segurança

Atenção! Certifique-se de que lê e compreende esta folha de dados do produto na totalidade.

Instalação

Atenção! A Vicair recomenda que instale e ajuste o Vicair® Strap back sob supervisão direta de um terapeuta ou consultor técnico.

- Certifique-se de que o tamanho do Vicair Strap back é apropriado para o espaldar da cadeira de rodas e almofada traseira da Vicair®. **1**
- Remova qualquer estofado existente no espaldar da cadeira de rodas. Desdobre as varas, assegurando que a fixação com velcro é fechada a todo o comprimento. Os ilhós de metal devem ficar na parte superior das varas do assento traseiro. **2a**

Aviso! Se uma barra obstruir a instalação, utilize os fechos. **2b**

- Se estiver disponível mais do que uma altura de fixação (ou seja, orifícios de parafuso), certifique-se de que o Vicair Strap back se encontra à altura correta para o cliente. **3**
- Fixe o Vicair Strap back à estrutura com dois parafusos. Se forem necessárias fixações com parafusos adicionais, siga as recomendações do fabricante da cadeira de rodas. **4**
- De ambos os lados: bloqueie os dois fechos com uma fita. **5**
- Aplique a almofada Vicair Liberty back ou Vicair Anatomic back ao Vicair Strap back (cumpra as indicações da folha de dados do produto anexa) e ajuste o posicionamento e requisitos de conforto do cliente.

