

Manual do utilizador



LIBERTY BACK SYSTEM

SISTEMA DE ENCOSTO LIBERTY

CE

MODELO STANDARD DISPONÍVEL



TAMANHOS STANDARD DISPONÍVEIS

LBS	Distância mínima e máxima entre os tubos traseiros:	
	cm	Poleg.
1	36 - 40	14 ³ / ₄ - 16
2	40 - 44	16 - 17 ¹ / ₂
3	44 - 48	17 ¹ / ₂ - 19



fig. A



fig. B



fig. C



fig. D

INTRODUÇÃO

O seu sistema de encosto Liberty Back Vicair® foi desenhado para ser usado conforme descrito neste manual. Leia, por favor, todo o manual antes de utilizar.

O sistema é composto pelas partes seguintes:

Cinta traseira

A cinta traseira é fixada nos tubos laterais da cadeira de rodas e esticada com fitas Velcro. A cinta traseira substitui o suporte de costas original e permite o encaixe do encosto. A cinta traseira está disponível em diferentes tamanhos para se adaptar às dimensões da cadeira de rodas e à almofada.

Almofada interior

A almofada interior é feita de um saco em polivinil, cheio com um número específico de células de ar triangulares, as SmartCells™, e uma pequena quantidade de lubrificante. A almofada tem dois compartimentos, com uma válvula no canto traseiro direito.

Capa exterior

A capa exterior é feita de nylon e Comfair, um tecido respirável, esticável em dois sentidos. Uma placa de espuma é adaptada nas costas. O painel grande da parte detrás permite a fixação da almofada na cinta traseira.

MONTAGEM

A Vicair recomenda a montagem, instalação e ajuste do sistema de encosta Liberty sob a vigilância direta do seu terapeuta ou agente da marca.

Verificar o tamanho

Juntamente com o seu terapeuta ou agente da marca, verifique se a almofada se adapta perfeitamente às dimensões do seu corpo e da sua cadeira de rodas. A almofada deve estar adaptada ao assento da cadeira de rodas ou ser um pouco mais pequena.

Montagem da cinta traseira

- Remova o apoio traseiro original da cadeira de rodas.
- Abra as duas pequenas fitas Velcro nos cantos inferiores.
- Deslize as partes laterais sobre os tubos traseiros da cadeira de rodas.
- Aperte as duas pequenas fitas Velcro nos cantos inferiores (fig. A).
- Passe os grampos pelos orifícios nos cantos superiores. Use os grampos pequenos para os tubos traseiros tam. 22-25 mm. Use os grampos maiores para os tubos traseiros tam. 25-28 mm.
- Feche os grampos até se sentir cómodo, por cima dos tubos traseiros (fig. B).
- Estique as cintas traseiras largas Velcro. Para maior segurança, as fitas Velcro podem ser enroladas através dos olhais para ficarem bem presas na posição.

Montagem da almofada por cima da cinta traseira

- Retire a proteção de plástico do encosto.
- Solte o painel traseiro do fixador Velcro na parte inferior da almofada.
- Coloque a almofada encostada na cinta traseira e adapte o painel traseiro por cima da cinta traseira (fig. C). Feche a fixação Velcro na parte inferior do painel. No final, o aspeto deverá ser o da fig. D.

INSTALAÇÃO

- Sente-se uns minutos na almofada e deixe que a almofada do encosto se adapte ao seu corpo.
- Com a ajuda do seu terapeuta ou agente da marca, ajuste o sistema do encosto para a posição desejada.
- Ao contrário das almofadas de assento Liberty, a válvula na almofada traseira NÃO deve ser aberta para ajustar a almofada.

Verificação da ocorrência de afundamento ("bottoming out")

Tanto as suas costas como a coluna devem ficar apoiadas pelas células de ar dentro da almofada; não devem tocar a parte debaixo da almofada. Esta verificação do afundamento ("bottoming out") deve ser feita aquando da primeira utilização e após eventuais ajustes.

- Sente-se com as costas encostadas no encosto durante cerca de 20 minutos.
- Incline-se ligeiramente para a frente da cadeira de rodas.
- Deixe que o seu terapeuta ou agente da marca deslize uma das mãos pela almofada e pelas costas.
- As costas devem ter um apoio de pelo menos uma camada completa de SmartCells™ .
- Se ocorrer afundamento, não use a almofada. Na maioria dos casos, a utilização de um modelo diferente ou um tamanho diferente de almofada solucionará o problema.

Estabilidade

Utilizando um Sistema de Encosto Liberty pode afetar o comportamento estático e dinâmico da cadeira de rodas. Verifique e ensaie o equilíbrio e a estabilidade da cadeira de rodas com ajuda do terapeuta ou agente da marca.

UTILIZAÇÃO

Verificação de ocorrência de vermelhidão da pele

Verifique a pele com regularidade para ver possíveis ocorrências de vermelhidão, sobretudo nos primeiros dias. Se ocorrer vermelhidão da pele e não desaparecer ao fim de 15 minutos, interrompa o uso da almofada. Consulte o seu terapeuta ou o agente da marca.

Utilização a alta altitude

Como cada SmartCells™ é cheia com ar, a almofada pode ter comportamentos diferentes se usada a alta altitude ou num avião. A Vicair recomenda que não se use a almofada acima dos 2400 m (8.000 pés) ASL (acima do nível do mar, ANM).

Utilização em veículos motorizados

Não existem dados disponíveis que garantam a utilização segura das almofadas Vicair® em veículos motorizados. Não recomendamos, pois, a sua utilização nessas circunstâncias.

Transferência da almofada para outro utilizador

Antes de uma segunda pessoa utilizar a almofada, limpe o seu interior e lave a capa exterior. Desinfete ambas as capas. O encosto deve estar corretamente ajustado à pessoa.

Substituição da capa exterior

Em circunstâncias normais, a Vicair recomenda a substituição anual da capa exterior. Capas sobresselentes podem ser compradas em separado.

Inflamabilidade

Não use nem deixe a almofada perto de chamas vivas ou a uma fonte de calor.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

Cuidado! Não limpar a vapor nem com autoclave. A almofada não aguenta temperaturas excessivas nem demasiada pressão.

Procurar células vazias ou desgastadas

Verifique a cada três meses e veja se há células vazias ou desgastadas. Verifique todas as partes mecânicas e veja se todas as fixações estão bem apertadas. Se os danos forem graves, ou se muitas células estiverem sem ar, não continue a usar a almofada. Consulte o agente da marca.

Limpeza da capa interior

Para remover pequenas nódoas use um pano macio e húmido e um detergente suave. Não use agentes de limpeza agressivos ou abrasivos nem objetos pontiagudos para limpar a capa interior.

Não lave a almofada interior na máquina de lavar.

Limpeza da capa exterior

Retire a almofada de espuma. A capa exterior pode ir à máquina de lavar roupa virada do avesso. Veja as instruções na etiqueta presa na capa interior.

Desinfecção

No caso de nódoas causadas por líquidos, e quando transferir a almofada para um segundo utilizador, deve desinfetá-la para não haver contaminação.

- Limpe a almofada interior e a capa exterior, conforme descrito acima. Quando lavar a capa exterior, use de preferência um agente de limpeza antibacteriano.
- Vaporize o desinfetante sobre a capa e a almofada interior.

GARANTIA

A Vicair presta uma garantia limitada contra defeitos de fabrico e de materiais por um período de dois (2) anos após a data da compra original, desde que o produto tenha sido usado normalmente. Quaisquer danos decorrentes de utilização anormal ou mau manuseamento, defeito de limpeza ou negligência são excluídos desta garantia. Se ocorrer um defeito de materiais ou de fabrico ocorrer no prazo de dois (2) anos a contar da data da compra original, a Vicair, segundo sua discricção, reparará ou substituirá o produto a título gratuito. A capa exterior não faz parte da garantia. Violações expressas aos termos da garantia limitam-se à reparação ou substituição do produto. Em caso algum os danos causados por violação aos termos da garantia incluirão danos consequenciais ou excederão o custo dos materiais não conforme vendidos.

Para mais informações sobre o produto, consultar o nosso website: www.vicair.com



WWW.VICAIR.COM

**VICAIR BV
Bruynvisweg 5
1531 AX Wormer
The Netherlands**

**T +31(0)75 642 9999
F +31(0)75 642 9990**

E info@vicair.com

070011-REV09/2015

